

اقرأ كل هذا الدليل بعناية قبل أن تبدأ هذا الاختبار.
قد يكون هذا الاختبار مختلفا عن الاختبار الذي استخدمته من قبل.

دليلك خطوة بخطوة الي الاختبار الذاتي السريع (انتيجن) Orient Gene Covid-19



هذه التعليمات الخاصة بالاستخدام تتعلق ب الاختبار الذاتي السريع (انتيجن)
Orient Gene Covid-19 (GCCOV-502a-H70GE) فقط.

يوضح الدليل كيفية اختبار نفسك أو شخص آخر COVID-19، وأبلاغ النتائج الي NHS.

تتوفر إصدارات اللغة البديلة بما في ذلك اللغة الويلزية و عروض الفيديو على

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة

اقرأ التعليمات وأتبع الخطوات بالترتيب الصحيح. يستغرق إعداد كل اختبار حوالي 15 دقيقة و سوف تكون النتائج جاهزة بعد 15 دقيقة أخرى.



نصيحة تتعلق بإجراء هذا الاختبار

هناك إرشادات مفيدة و نصائح و صناديق تحذيرية منتشرة على طول الدليل لمساعدتك. باتباع هذه التعليمات خطوة بخطوة وبعناية، سوف يكون لديك فرصة أفضل بكثير للحصول علي نتيجة جديرة بالثقة.

إرشادات و تحذيرات عامة

- إذا كنت تعاني من نزيف بالانف خلال المسحة، رجاء التوقف عن إجراء المسحة. لا يمكن اختبار المسحة.
- لم يتم تصنيع المنتج من لاتكس المطاط الطبيعي، ومع ذلك أن وجود أو آثار لاتكس المطاط الطبيعي في المنتج كما تم تسليمه الي المستخدم النهائي لا يمكن تجاهله نهائيا.
- احتفظ بمجموعة الاختبار بعيدا عن متناول الأطفال.
- جميع مكونات المجموعة هي بنود تستخدم مرة واحدة فقط ما عدا حامل أنبوب الاستخراج. لا تعيد استخدام أي من مكونات المجموعة المستخدمة مثل المسحات أو أنابيب الاستخراج، ما عدا حامل أنبوب الاستخراج.
- لا تخلط المكونات من علب مجموعات مختلفة. استخدم مكونات المجموعة المتوفرة في هذه المجموعة فقط.
- لا تستخدم كاسيت الاختبار اذا كان قد تعرض الي مواد التنظيف المنزلية (بصفة خاصة المبيض) حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي الي نتيجة غير صحيحة.
- لا تقوم بإجراء الاختبار تحت أشعة الشمس المباشرة لأن ذلك من الممكن أن يؤدي الي نتيجة خاطئة.
- هذه المجموعات مصممة للإستخدام الأدمى فقط.
- لا تتخلص من حامل أنبوب الاستخراج، يمكن استخدامه مرة أخرى لجميع الإختبارات.

محتويات هذا الكتيب

قسم	عنوان	صفحة
1	جهاز مكان اختبارك	6
	أفحص محتويات مجموعة الاختبار الخاصة بك	7
2	جهاز الاختبار الخاص بك	8
3	خذ عينة المسحة الخاصة بك	10
	إجراء الاختبار على شخص آخر	11
4	معالجة عينة المسحة	12
5	اقرأ النتيجة الخاصة بك	14
6	أبلاغ النتيجة الخاصة بك	15
7	ماذا تعني النتائج الخاصة بك	16
8	أداء الاختبار	17
9	تخلص من مجموعة الاختبار الخاصة بك بطريقة آمنة	17
	دون نتائج الاختبار الخاصة بك	18

نصيحة

- خزن مجموعة الاختبار في درجة حرارة الغرفة العادية أو في مكان بارد جاف (2 درجة مئوية الي 30 درجة مئوية).
- لا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة ولا تخزنها في الفريزر.
- يجب استخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين (15 درجة مئوية الي 30 درجة مئوية). إذا كانت المجموعة مخزنة في منطقة درجة حرارتها أقل من 15 درجة مئوية، اتركها لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الغرفة العادية قبل الاستخدام.

حوالي 1 من 3 أشخاص مصابين COVID-19 لا يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض.

من خلال الاختبار الذاتي، نستطيع إبطاء الانتشار و نساعد في حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في عائلاتنا و مجتمعاتنا.

لمن يناسب هذا الاختبار




الأطفال تحت سن 12 سنة

الأطفال تحت سن 12 سنة من العمر يجب اختبارهم بواسطة شخص بالغ. لا تجري الاختبار إذا كنت لا تشعر بالثقة لاختبار الطفل. لا تستمر في إجراء الاختبار إذا كان الطفل يشعر بالألم.



المراهقون ما بين سن 12-17 سنة

قم باختبار نفسك و الإبلاغ تحت إشراف شخص بالغ. يمكن للشخص البالغ إجراء الاختبار، عند الضرورة.

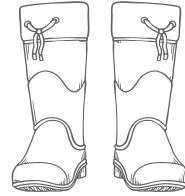

البالغين فوق سن 18

الاختبار الذاتي والإبلاغ، بالمساعدة إذا لزم الأمر.

- يستطيع الأشخاص المعاقون بصريا استخدام مجموعة اختبارنا، ولكن من الممكن أن يكونوا في حاجة الي المساعدة.
- هذا الاختبار لا يناسب الأشخاص المعرضين لنزيف الأنف، أو الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في الوجه أو الرأس خلال آخر 6 أشهر ماضية.

كم مرة يمكنك إجراء الاختبار

قد يختلف عدد مرات الاختبار طبقا لظروفك و الارشادات المحلية أو الوطنية.

أين يمكنك الحصول على دعم إضافي

يمكنك الحصول علي المزيد من المعلومات عن الاختبار الذاتي في:

gov.uk/covid19-self-test-help

لماذا يجب ان تقوم بإجراء الاختبار الذاتي

مجموعة الاختبار الذاتي السريع (انتيجن) COVID-19 هي اختبار مسحة للأنف للتأكد اذا ما كنت معديا. يتم إجراء هذا الاختبار للأشخاص الذين لديهم أعراض و الذين ليس لديهم أعراض. ومع ذلك، يجب عليك إتباع الاجراءات الوطنية للتحقق من نوع الاختبار المناسب لك.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 ايجابية، يجب عليك:

- المساعدة في الحد من إنتشار المرض، يجب عليك و على أسرتك إتباع الإرشادات الحكومية الحالية: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
- عليك بار شاد الأشخاص الذين كنت علي إتصال وثيق بهم أو الأماكن التي قمت بزيارتها في الـ 48 ساعة الأخيرة قبل بداية ظهور الأعراض، او من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة التحليل الإيجابية في حالة عدم وجود أعراض، لا جراء اختبار إحتماالية أصابتهم بفيروس COVID-19. اتبع دائما الاجراءات المحلية و الوطنية.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 سلبية

من المحتمل انك لم تكون معديا وقت إجراء الاختبار. ومع ذلك، فإن النتيجة السلبية للاختبار لا تضمن عدم اصابتك بفيروس كورونا. يجب عليك الإستمرار في أتباع الأرشادات الحكومية.

نصيحة

إذا كنت تعاني أنت أو طفلك/أطفالك من أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، أو أصبت بفيروس كورونا (COVID-19)، يرجى الرجوع الي أرشادات NHS عبر الإنترنت:

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

إذا كنت تعاني أنت أو طفلك/أطفالك من أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، و تزداد الحالة سوء، أو لم تتحسن أنت /طفلك/أطفالك بعد 7 أيام، رجاء زيارة خدمة NHS 111 عبر الإنترنت:

111.nhs.uk اذا لم يكن لديك إتصال بالانترنت أتصل NHS 111. للطوارئ الطبية، أتصل 999.

لا تتأخر في الحصول على المساعدة، اذا كنت تشعر بالقلق. ثق دائما في غرانزك.

تحقق من محتويات المجموعة الخاصة بك

1. جهز مكان اختبارك

4 يجب ان تجد التالي في صندوق الاختبار الخاص بك:



أغلق الشنطة (x7)
استخدمها كشنطة للنفايات



كاسيت الاختبار في حقيبة
محكمة الأغلاق (x7)



مسحة معقمة في غلاف محكم
الأغلاق (x7)



حامل انبوب الاستخراج
(1X يمكن إعادة استخدامه)
(لا تقوم بالتخلص منه)



غطاء القطارة (x7)



أنبوب الاستخراج مع المخزن
(x7)

نصيحة

ماذا تفعل في حالة تلف شيء ما أو كسره أو فقده

إذا لاحظت تلف، كسر أو فقد أي شيء، رجاء عدم استخدام مجموعة الاختبار. يمكنك تقديم التغذية المرجعية عن طريق الاتصال بمركز إتصال العملاء. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.


اتصال: 119 (مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية).
نحن نقدم الدعم بعدد 200 لغة و لغة الاشارة البريطانية.

إذا تعرضت للادوي من قبل جهاز ما، الابلاغ عن ذلك من الممكن أن يساعد الآخرين، رجاء زيارة الرابط التالي: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

سوف تحتاج إلى:

- مؤقت مثل ساعة أو منبه
- مناديل ورقية
- مرآة
- منظف أسطح
- معقم للأيدي أو صابون ومصدر للمياه الدافئة

1

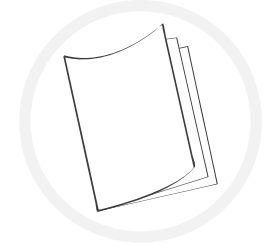

اقرأ تعليمات هذا الدليل بعناية.
يمكنك أيضا مشاهدة فيديو اختبار المسحة عبر الإنترنت، إذا كنت بحاجة الى المزيد من المساعدة:
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

2



قبل بدء الاختبار مباشرة، قم بترتيب و تنظيف و تجفيف سطح مستوي لوضع مجموعة الاختبار عليه.
هذا لتجنب تلويث الاختبار.

3



أغسل يديك جيدا لمدة 20 ثانية مستخدما الصابون و المياه الدافئة أو معقم اليدين.
إذا كنت تقوم بإجراء الاختبار لأكثر من شخص واحد وتقوم بإعادة اختبار باطل، نظف السطح وأعد غسل يديك بين كل اختبار. هذا لتجنب تلويث الاختبار.

20
ثانية

2. جهاز الأختبار الخاص بك

5 أحتفظ بالأنبوب بعيدا عن وجهك، قشر بلطف فيلم الغلق الموجود على أنبوب الاستخراج لتجنب أنسكاب أي سائل.



انتباه

يحتوي محلول الاستخراج علي مواد حافظة قد تسبب رد فعل حساسية لبعض الأشخاص. إذا لمس السائل الجلد أو العين، قم بغسلهما بالكثير من الماء. في حالة حدوث تهيج في الجلد، أحصل علي رعاية طبية.

تحذير

لا تعض فيلم أحكام الغلق الخاص بانبوب الاستخراج. تجنب تلامس سائل الاستخراج مع جلدك.

6 ضع أنبوب الاستخراج الذي يحتوي على السائل داخل حامل أنبوب الاستخراج.



7 قم بنفث أنفك بلطف داخل منديل ورقي و تخلص منه بعيدا في نفايات المنزل البعيدة. هذا لكي تتخلص من المخاط الزائد. إذا كنت تقوم بإجراء الاختبار لطفل/ شخص تابع، ساعده على نفث أنفه، كما هو مطلوب.




8 أغسل يديك جيدا لمدة 20 ثانية بعد نفث أنفك، مستخدما الصابون والماء، أو معقم الايدي. هذا لتجنب تلوين الأختبار.



20
ثانية

إذا كنت تساعد طفل/تابع لنفث أنفه، يجب على كل منكما غسل يديه جيدا لمدة 20 ثانية، أو استخدام معقم الأيدي.


9 أبحث عن المسحة المعقمة في المغلف المحكم الأغلاق. حدد الطرف النسيجي الناعم للمسحة.

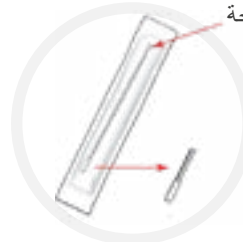

الأمساك بالمسحة

طرف المسحة

10 أنزع عبوة المسحة و اخرج المسحة برفق.

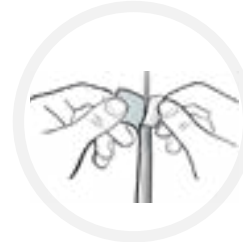

تحذير

لا تلمس طرف قطعة القماش الخاص بالمسحة بيديك أو تلمس أي أسطح.

3. خذ عينة المسحة الخاصة بك

إجراء الاختبار على شخص آخر

يجب إجراء الاختبار للأطفال تحت سن 12 سنة بواسطة شخص بالغ. أتبع الإرشادات المذكورة أدناه عن كيفية تجهيز واختبار طفل أو شخص يتطلب المساعدة. يمكنك مشاهدة فيديو توضيحي في: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help إذا كنت تقوم باختبار طفل، اظهر له مجموعة الاختبار و تحدث اليه عما سوف تفعله. إذا كان من الممكن، اجلسه علي حجر شخص ما أو اجعل شخص ما يمسك يديه. اطلب من الطفل أن يقوم بنفث أنفه في المنديل الورقي. تخلص من المنديل في سلة مغلقة.

تحذير

رجاء التأكد من ازالة اي تقويب للأنف أو مجوهرات مماثلة قبل المسحة.


إذا كنت تقوم بإجراء مسحة لطفل تحت سن 12 سنة أو شخص يتطلب المساعدة، أتبع الخطوات المذكورة في الصفحة رقم 11.

أختبار نفسك

فتحة الأنف الأولى

ضع طرف نسيج الخاص بالمسحة داخل فتحة أنف واحدة فقط (حوالي 2.5 سم)، تأكد من أن طرف نسيج المسحة موضوعة داخل الأنف 2.5 سم داخل فتحة الأنف الأولى.


أمسح المسحة برفق حول الجدار الداخلي من أنفك في حركة دائرية 5 مرات. تأكد من وجود تلامس بين طرف نسيج المسحة وداخل فتحة الأنف. ليست هناك حاجة لأستعمال القوة ولا يجب عليك الدفع بعيدا في فتحة أنفك.

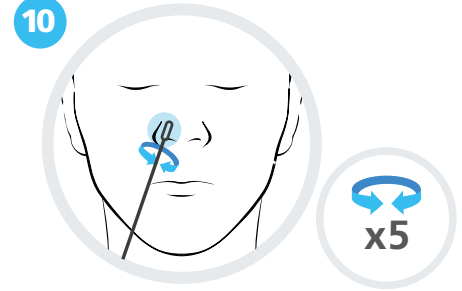

فتحة الأنف الثانية

أستخدم نفس المسحة، ضع طرف نسيج الخاص بالمسحة داخل فتحة الأنف الأخرى فقط (حوالي 2.5 سم)، تأكد من أن طرف نسيج المسحة موضوعة 2.5 سم داخل فتحة الأنف الثانية.

أمسح المسحة برفق حول الجدار الداخلي من أنفك في حركة دائرية 5 مرات. تأكد من وجود تلامس بين طرف نسيج المسحة وداخل فتحة الأنف.

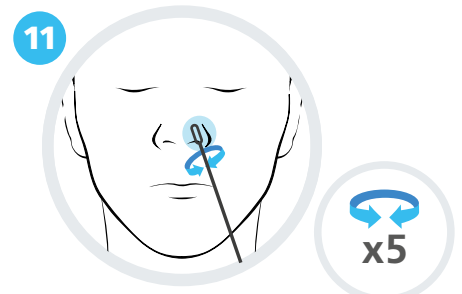


تحذير

إذا عانيت من نزيف في الأنف أثناء إجراء المسحة، يرجى التوقف عن إجراء المسحة. لا يمكن أختبار المسحة. ينصح باستشارة طبيبك إذا استمر النزيف.

فتحة الأنف الأولى

ضع طرف نسيج المسحة داخل فتحة أنف واحدة فقط للطفل/الشخص الذي تقوم باجراء الاختبار له.


أمسح المسحة برفق علي الجدار الداخلي لفتحة الأنف بحركة دائرية 5 مرات. لا توجد حاجة الي استعمال القوة ولا يجب عليك ادخال المسحة بعيدا في فتحة الأنف، تأكد من وجود تلامس جيد بين طرف نسيج المسحة والجدار الداخلي لفتحة الأنف الأولى.

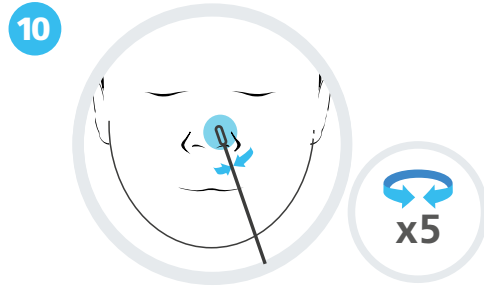

فتحة الأنف الثانية

استخدم نفس المسحة، ضع طرف نسيج المسحة داخل فتحة الأنف الأخرى فقط للطفل/الشخص الذي تقوم باجراء الاختبار له.

أمسح المسحة برفق علي الجدار الداخلي لفتحة الأنف بحركة دائرية 5 مرات، تأكد من وجود تلامس جيد بين طرف نسيج المسحة و داخل الفتحة الثانية للأنف.

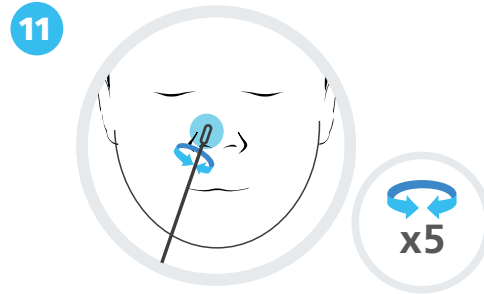

تحذير

إذا تعرض الشخص الذي تقوم بعمل المسحة له لنزيف في الأنف، رجاء التوقف عن أخذ المسحة. لا يمكن أختبار المسحة. ينصح باستشارة الطبيب الخاص به إذا استمر النزيف.

4. معالجة عينة المسحة

16 ادفع غطاء القطارة باحكام الي انبوب الاستخراج لتجنب اي تسريبات.

ضع أنبوب الاستخراج مرة أخرى في حامل أنبوب الاستخراج.



17 افحص تاريخ الصلاحية (EXP) علي المغلف المحكم الأغلاق. أخرج كاسيت الأختبار من المغلف المحكم الأغلاق ووضعه علي سطح مستوي نظيف.

تحذير

يجب التخلص من كاسيت الأختبار الذي يترك خارج المغلف المحكم الأغلاق لمدة تتجاوز 30 دقيقة. تخلص من شنطة المجفف الداخلية و المغلف بأسلوب آمن داخل شنطة النفايات البلاستيك/القابلة للأغلاق.



18 أضغط برفق على أنبوب الاستخراج لوضع 4 نقاط من السائل داخل بئر العينة (الذي يحمل العلامة S) في كاسيت الأختبار.

نصيحة

تأكد من وضع كاسيت الأختبار على سطح مستوي و أفقي. لا تحرك كاسيت الأختبار أثناء الأختبار. أضف القطرات الي العينة ببطء. لا تملئ حتى يفيض.




19 أضبط المؤقت. أنتظر لمدة 15 دقيقة قبل قراءة النتيجة.



12 ضع طرف نسيج المسحة داخل سائل انبوب الاستخراج.

أضغط طرف المسحة علي حافة انبوب الاستخراج بقوة، بينما تقوم بتدويره حول الانبوب 6 مرات علي الأقل.

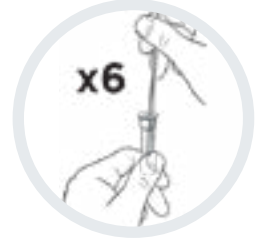

13 اترك المسحة في انبوب الاستخراج، اضبط المؤقت و اتركها لمدة دقيقة واحدة.



14 أسحب المسحة من انبوب الاستخراج.



15 ضع المسحة داخل الشنطة البلاستيك محكمة الاغلاق.

نصيحة

يمكن استخدام الشنطة الفردية القابلة للأغلاق كشنطة للنفايات.



5. اقرأ النتيجة الخاصة بك

6. أبلغ عن النتيجة الخاصة بك

هام

20
دقيقة

لا تترك الاختبار ليتطور لفترة أطول من 20 دقيقة لأن ذلك قد يجعل النتيجة باطلة.

ينبغي الإبلاغ عن النتائج الإيجابية و السلبية و الباطلة الخاصة بك الي NHS.

يساعد تسجيل جميع نتائج الاختبارات العلماء علي اكتشاف حالات تفشي الفيروس الجديدة و كيفية التعامل معها. إذا أبلغ الأشخاص عن الحالة الإيجابية فقط، سوف تبدو معدلات الحالة أعلى مما هي عليه فعليا.

لذلك حتي ولو كانت نتيجتك سلبية أو باطلة، يجب عليك التأكد من أن المعلومات الخاصة ب NHS دقيقة.

أنت بحاجة الي رمز QR، أو رقم بطاقة الهوية تحتة للإبلاغ عن نتيجتك.



عليك الإبلاغ عبر الإنترنت (أسرع)

إذا كنت تعيش في إنجلترا، ويلز أو شمال أيرلندا، قم بزيارة:
gov.uk/report-covid19-result

إذا كنت تعيش في اسكتلندا، قم بزيارة:
covidtest.scot

أو الإبلاغ هاتفيا

أتصل برقم 119


الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا إلي الساعة 11 مساء، (مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية)



نتيجة إيجابية +

يظهر خطان. ينبغي أن يكون خط ملون واحد في منطقة تحكم الخطوط (C)، وخط ملون آخر ينبغي أن يكون في منطقة اختبار الخط (T).


خطان، احدهما بجانب C و الآخر بجانب T، تكون نتيجة الاختبار إيجابية حتي لو كان الخطان باهتان.

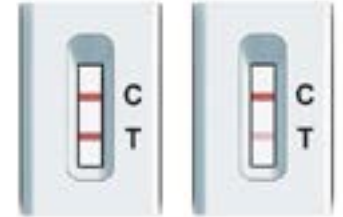

هام


إذا كانت النتيجة إيجابية، يجب عليك عزل نفسك ويجب علي أسرتك أتباع الشروط الحكومية بشأن العزل الذاتي:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

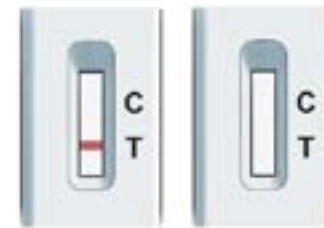

نتيجة باطلة

فشل خط التحكم (C) في الظهور.

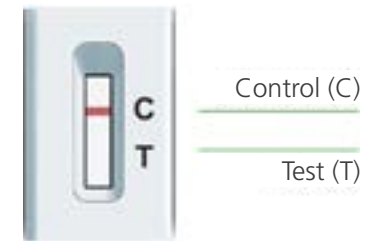

نتيجة سلبية -

خط واحد ملون يظهر في منطقة تحكم الخط (C). لا يظهر خط في منطقة اختبار الخط (T).

7. ماذا تعني النتائج الخاصة بك

أنت تكون قد أكملت اختبارك عند الإبلاغ عن النتيجة الخاصة بك

نتيجة ايجابية

إذا كانت نتيجةك إيجابية، من المحتمل أن تكون مصاب حاليا بـ COVID-19، وتخطر بعدوي الآخرين. يجب أن تقوم بعزل نفسك. عندما تقوم بالإبلاغ عن النتيجة الخاصة بك سوف يتم تزويدك بمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية التي يجب إتخاذها.

تحذير

يجب عليك أنت و أهلک أتباع الإرشادات الوطنية. يجب عليك وأي شخص يعيش معك، أتباع الإرشادات الوطنية و المحلية الحالية. يمكن العثور علي هذه الإرشادات في: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

نتيجة باطلة

إذا حصلت على نتيجة باطلة، هذا يعني أنه من غير الممكن تحديد أنك مصاب بالفيروس في وقت إجراء الاختبار. للتأكد من أنك مصاب بفيروس كورونا، قم بإجراء اختبار آخر بأسرع وقت ممكن. لا تعيد استخدام أي شيء من الاختبار الأول، وابدأ إجراءات الاختبار من الخطوة رقم 1.

إذا أستمرت المشكلة

إذا أستمرت المشكلة، توقف عن استخدام مجموعات الاختبار في الحال. إذا لم يكن لديك اختبار آخر متاح، يمكنك إجراء نوع مختلف من الاختبارات من خلال تطبيق NHS COVID-19 أو من خلال زيارة: gov.uk/get-coronavirus-test أو عن طريق الإتصال بمركز إتصال العملاء 119. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.

8 أداء الاختبار

من المحتمل جدا أن يعطي الاختبار نتيجة ايجابية اذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من فيروس كورونا (COVID-19). يعني هذا أنه من المحتمل جدا اكتشاف الأشخاص المصابين حاليا وفي حاجة الي العزل الذاتي فورا.

9 تخلص من مجموعة الاختبار الخاصة بك بطريقة آمنة

بمجرد إستكمال الاختبار، ضع كل محتويات مجموعة الاختبار في شئمة النفايات الموفرة، ما عدا حامل الانبوب البلاستيك، وضع هذا في نفايات المنزل العامة الخاصة بك. أغسل يديك جيدا بعد التخلص منها.

نصيحة

يمكن استخدام الشئمة الفردية القابلة للأغلاق كشنطة للنفايات.

نتيجة سلبية

إذا حصلت على نتيجة سلبية، من المحتمل أنك لم تكن مصاب في وقت إجراء الاختبار. ومع ذلك، فإن النتيجة السلبية للإختبار، لا تعد ضمانة علي عدم أصابتك بفيروس COVID-19.

إذا كان الاختبار سلبيا، يجب عليك مواصلة أتباع القواعد و الإرشادات الوطنية و المحلية، متضمنا ذلك غسل اليدين بانتظام، و التباعد الاجتماعي و إرتداء أغطية الوجه عند الإقتضاء.

إذا ظهرت عليك أعراض يجب عليك عزل نفسك والحصول علي الاختبار الموصى به في: gov.uk/get-coronavirus-test أو عن طريق الإتصال بمركز إتصال العملاء 119. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.



CE 0123

يسمح بتوفير هذا الجهاز فقط كجزء من قسم الرعاية الصحية والاجتماعية (DHSC) التابع
لاختبار NHS وبرنامج التتبع.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd
العنوان: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (الصين)
التليفون: +86-572-5226111 فاكس رقم: +86-572-5226222
الموقع الإلكتروني: www.orientgene.com
quality@orientgene.com



SENSUS GROUP LTD



The Barn, Tednambury Farm, Tednambury,
Spellbrook, Herts, CM23 4BD
(United Kingdom المملكة المتحدة)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
العنوان: (ألمانيا) Eierstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



معلومات المسحة :

CE 0197

Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
العنوان: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (الصين)



Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (ألمانيا)
البريد الإلكتروني: info@llins-service.com



الرموز المستخدمة

لا تستخدم المنتج
عندما تكون
العبوة تالفة



الصانع



تعقيم باستخدام
أكسيد الايثيلين



خزن في درجة
حرارة 2-30
درجة مئوية



جهاز طبي للتشخيص
في المختبر



تاريخ انتهاء الصلاحية



رقم الدفعة



تحذير، رجاء
الرجوع الى
التعليمات



لا تعيد الاستخدام



تاريخ التصنيع



البقاء بعيدا عن
ضوء الشمس



عدد الوحدات
في العبوة (7)



أستشر تعليمات
الاستخدام



الإحتفاظ به جافا



لا تعيد التعقيم




رقم الكتالوج



شجرة اللاتكس



الشخص المسؤول
في المملكة المتحدة.

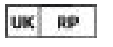

الممثل الأوروبي المفوض



نسخة رقم B22088-03 تاريخ الصلاحية 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE



يشير الكتيب فقط الى الاختبار الذاتي السريع (انتيجن) :Orient Gene Covid-19 :GCCOV-502a-H7OGE

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الى NHS