




## 4

- یقینی بنائیں کہ آپ نے نمونے والی بوتل پر تاریخ لکھی ہو۔
- مہیا کردہ لفافے میں نمونے والی بوتل رکھیں۔
- ٹیپ اُتار دیں اور لفافہ سر بمہر کریں اور حوالہ ڈاک کر دیں۔



## 3

- سٹک واپس بوتل میں رکھ دیں اور 'کلیک' کر کے ڈھکن بند کر دیں۔
- استعمال کے بعد بوتل مت کھولیں۔
- استعمال کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔

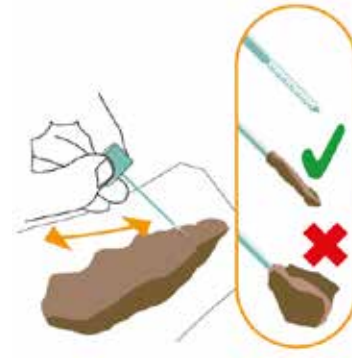

## 2

- نمونے والی بوتل کھولنے کے لیے ڈھکن گھمائیں۔
- سٹک سے پاخانے کا نمونہ اُس وقت تک کھرچتے رہیں جب تک کہ اس کے لئے بنے ہوئے تمام چھوٹے سوراخ کور نہ ہو جائیں۔
- ٹسٹ کے لیے ہمیں صرف تھوڑا سا پاخانہ درکار ہے براہ مہربانی زیادہ مت ڈالیں۔



## 1

- نمونے والی بوتل پر تاریخ بائرو (بال پوائنٹ پن) سے لکھیں۔
- اپنا پاخانہ اکٹھا کرنے کے لیے ڈبہ یا ٹیسٹو ٹوائلٹ پیپر کی تہیں استعمال کریں۔
- اپنے پاخانے کو ٹوائلٹ کے پانی سے نہ چھونے دیں۔

## جتنی جلد ممکن ہو سکے حوالہ ڈاک کر دیں