



Instrukcje dotyczące sposobu użycia zestawu testowego

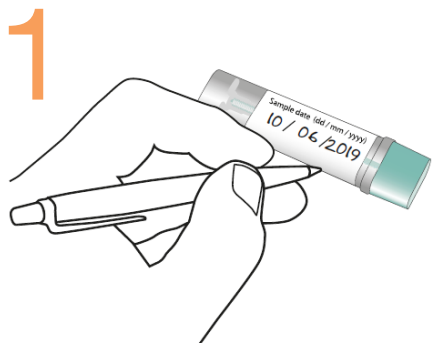


- Zapisać datę na butelce na próbkę długopisem
- Użyć pojemnika lub warstw papieru toaletowego w celu złapania kału
- Nie dopuścić do kontaktu kału z wodą w toalecie

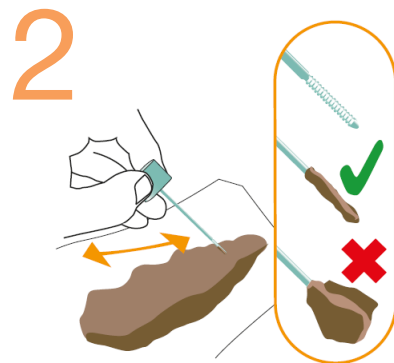

- Przekręcić zakrętkę, aby otworzyć butelkę na próbkę
- Zebrać próbkę, przesuwając patyczek wzdłuż kału, aż wszystkie rowki zostaną pokryte
- Do badania potrzebna jest tylko niewielka ilość kału.
Nie dodawać więcej!



- Włożyć patyczek z powrotem do butelki i zakręcić, aż rozlegnie się „kliknięcie”
- Nie otwierać butelki ponownie po użyciu
- Umyć ręce po użyciu

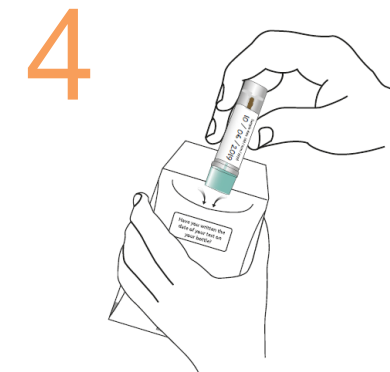

- Upewnić się, że na butelce z próbką zapisano datę
- Butelkę z próbką umieścić w dołączonej kopercie zwrotnej
- Odkleić taśmę, zakleić kopertę i wysłać pocztą

Wysłać pocztą tak szybko, jak to możliwe