


4

- تأكد من أنك كتبت التاريخ على زجاجة العينة
- ضع زجاجة العينة في ظرف الإرجاع الموفر
- انزع الشريط، وأغلق الظرف وأرسله




3

- ارجع العصا في الزجاجة و"اضغط" على الغطاء لإغلاقه
- لا تعيد فتح الزجاجة بعد الاستعمال
- يرجى غسل يديك بعد الاستخدام

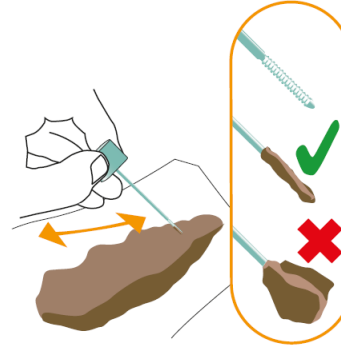

2

- لفتح زجاجة العينة يجب لف الغطاء
- اجمع العينة عن طريق كشط العصا على طول البراز حتى يتم تغطية جميع الأحاديث
- نحن بحاجة فقط إلى قليلا من البراز للاختبار. يرجى عدم الإضافة من المزيد!

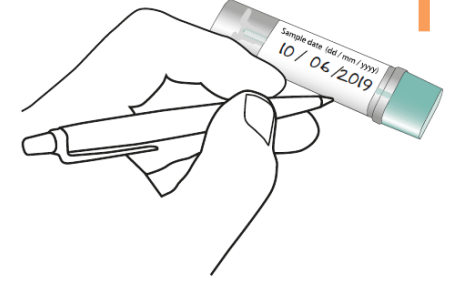

1

- اكتب التاريخ على زجاجة العينة بالفلم الجاف
- استخدام وعاء أو طبقات من ورق التواليت للقبض على برازك
- لا تدع برازك يلمس ماء المراض

برجاء الإرسال في البريد في أقرب وقت ممكن