




- حتماً تاریخ را روی درب بطری نمونه بنویسید
- بطری نمونه را در پاکت برگشت ارائه شده قرار دهید
- لایه روی نوار چسب را بردارید، پاکت را ببندید و آن را پست کنید



- میله چوبی را در داخل بطری قرار داده و درپوش آن را ببندید تا صدای "تق" بدهد
- بطری را بعد از استفاده باز نکنید
- لطفاً دست‌هایتان را پس از استفاده بشویید

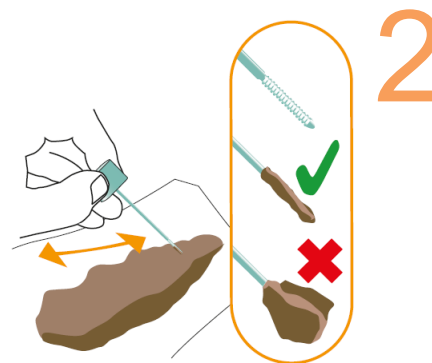

- درپوش را بچرخانید تا بطری نمونه باز شود
- به جمع‌آوری نمونه با کشیدن میله به مدفوع ادامه بدهید تا زمانی که تمام شیارها پوشانده شود
- برای انجام آزمایش تنها به مقدار کمی مدفوع نیاز است. لطفاً مقدار بیشتری اضافه نکنید!



- تاریخ روی بطری نمونه را در برگه بنویسید
- از یک ظرف یا تعدادی دستمال توالت برای گرفتن مدفوعتان استفاده کنید
- اجازه ندهید مدفوعتان با آب دستشویی تماس پیدا کند

**لطفاً در اسرع وقت آن را پست کنید**