



# 关于如何使用验便盒的说明

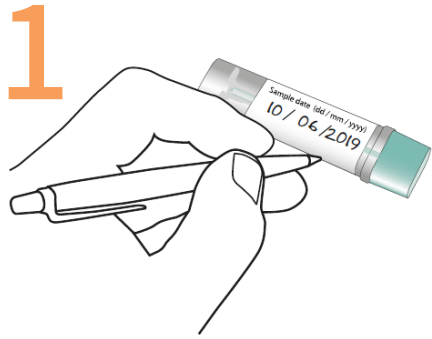

- 用圆珠笔在样品瓶上写上日期
- 用一个容器或几层卫生纸来接住您的粪便
- 请勿让您的粪便接触厕所的水

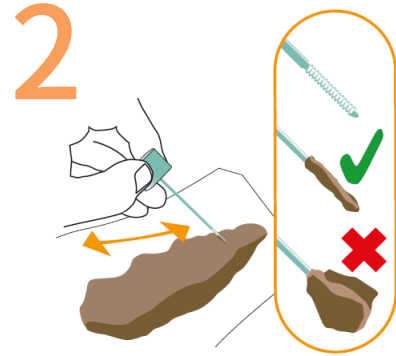

- 拧开盖子打开样品瓶
- 收集样品时要沿着粪便刮擦刮片,直到覆盖所有凹槽
- 我们只需要检测一点儿粪便。**请不要再额外添加!**



- 将刮片放回瓶子里,然后拧上盖子,听见“咔哒”一声表示已拧紧
- 使用后,请勿重新打开瓶子
- 使用后,请洗手



- 确保您在样品瓶上写上日期
- 将样品瓶放入所提供的回邮信封中
- 撕下胶带,封好信封并邮寄

请尽快邮寄