



關於如何使用驗便盒的說明

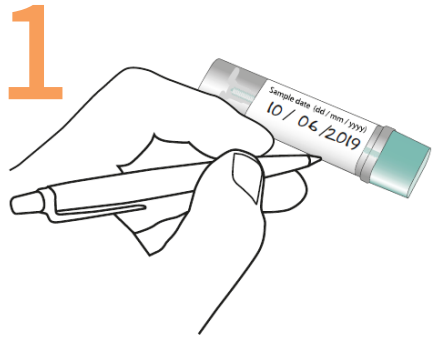

- 用圓珠筆在樣品瓶上寫上日期
- 用一個容器或幾層衛生紙來接住您的糞便
- 請勿讓您的糞便接觸廁所的水

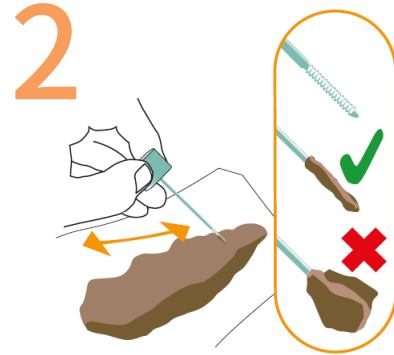

- 擰開蓋子打開樣品瓶
- 收集樣品時要沿著糞便刮擦刮片，直到覆蓋所有凹槽
- 我們只需要檢測一點糞便。**請不要再額外添加!**



- 將刮片放回瓶子裡，然後擰上蓋子，聽見「啞嗒」一聲表示已擰緊
- 使用後，請勿重新打開瓶子
- 使用後，請洗手



- 確保您在樣品瓶上寫上日期
- 將樣品瓶放入所提供的回郵信封中
- 撕下膠帶，封好信封並郵寄

請儘快郵寄