

સૂચનાઓ


અમારી સૂચનાઓનો વિડિઓ જુઓ

www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

તમારી કિટમાં શું છે?



સંગ્રહ કરવા માટેનું ટબ

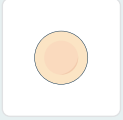

પ્લાસ્ટર્સ x 2



એલ્કોહોલ લૂછણિયુ (વાઈપ)



સાફ કરવાનું લૂછણિયુ



લાન્સિટ (ચોરવા માટે મેડિકલનું અણીવાળુ સાધન) x3




પૂર્વચૂકવણીવાળુ પરબોડિયુ



રવાના કરવાના ફોર્મ ઉપર ટચબનું લેબલ



સ્વચ્છ પ્લેસ્ટિક બેગ

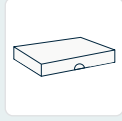

કાર્ડબોર્ડ બોક્સ



રવાના કરવા માટેનું ફોર્મ

તમે શરૂ કરો તે પહેલાં ગરમ પાણીનો બોલ કે વાટકો અને સ્વચ્છ ટિશ્યૂ લો



તૈયાર થઈ અને થયાસ્થાને ગોઠવો

શરૂ કરતા પહેલાં, ખાતરી કરો કે તમે...

✓ આ સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો

✓ તમારી કસોટી કે ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવી તે જુઓ

જાઓ www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample

✓ ઘણું બધું પાણી પીઓ

તૈયારી સમયે જલયોજિત (હાઈડ્રેટેડ) થવાનું કરી શકો તે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ

કહેવાય - તમારી કસોટી કે ટેસ્ટની ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટો પહેલાં 2

ગ્લાસીસ પાણી પીઓ.

✓ પૂરતો સમય બાજુએ રાખો

તૈયાર થવા આશરે 30 મિનિટસનો તમારો સમય માટે આપો, થયાસ્થાને ગોઠવો કે મૂકો અને તમારો નમૂનો એકત્રિત કરો - ખાસકરીને જો આ તમારું પહેલીવખત હોય.

✓ થોડીક હળવી કસરત કરો


જમિંગ જેકસ કરો, અથવા તમારા હાથ ઝુલાવી (સ્વિંગ) અને એક મિનિટ માટે મુષ્ટિ (ફિસ્ટ) સજ્જડ કરો (જો તેમ કરવાનું તમારા માટે સલામત હોય તો) - આથી તમારું લોહી ફરવામાં મદદરૂપ બને છે.

શનિવારે, તમારી કસોટી કે ટેસ્ટ કરશો નહિ, અથવા પોસ્ટ કરશો (નહિ), - તે પોસ્ટમાં લાંબો વખત પડી રહેશે. કોઈ પણ બીજો દિવસ સારો રહે.



1. તૈયાર રહો

1. શરૂ કરતાં પહેલાં તપાસ કરો કે કિટ તમને સંબોધિત કરવામાં આવેલ છે.
2. કોઈ એક નીચા (લો) ટેબલ ઉપર તમારી કિટ રાખો.
3. કોઈ એક સ્વચ્છ ટિશ્યૂ અને ગરમ પાણીનો બોલ લો.
4. 20 સેકન્ડો માટે તમારા હાથો સાબુ સાથે ધૂઓ અને કોઈ એક સ્વચ્છ ટોવેલથી સૂકા કરો.

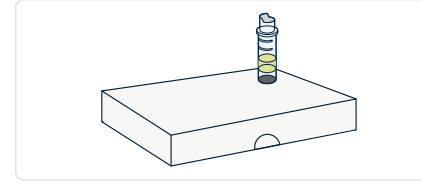

2. રચના કે ગોઠવણી




1. ટચૂબમાંથી ઢાંકણને દૂર કરો.
2. કાર્ડબોર્ડ બોક્સના ઉપરના ભાગમાંના સ્લોટ કે નિયત કરેલ જગ્યાનો ઉપયોગ કરી ટચૂબને ઉભી-સીધી રાખો.
3. પ્લાસ્ટર તૈયાર કરો કે જેથી તે તમારી આંગળી ઉપર ફટ દઈને (પોપ અપ) આવવા તૈયાર રહે.



3. લોહીને વહેવા દો

1. તમારા આખા હાથને ગરમ પાણીના બોલમાં (આશરે નહાવાના ઉષ્ણતામાને હોય) 2 મિનિટો માટે મૂકો. ત્યારબાદ કોઈ એક સ્વચ્છ ટિશ્યૂથી તમારા હાથ સૂકા કરો.
2. સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે ઊભા રહો (પણ જો તમને મૂર્છા જેવું લાગે તો, બેસી જાઓ - અને જો તમે કોઈ એક સાથે રહેતા હો તો, તેઓની મદદ માટે વિનંતી કરો). લોહીને વહેવા દેવા માટે તમારા હાથ અવશ્ય તમારી કોણી કરતાં નીચા રાખો.

તમારો નમૂનો ભેગો કરો

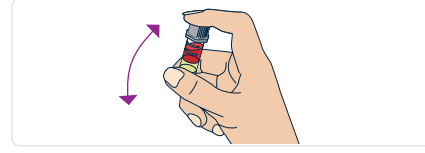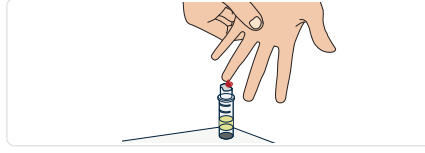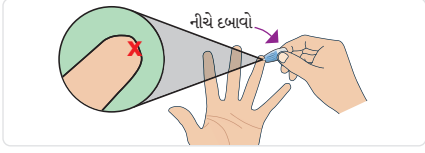

1. લાન્સિટનો (ચીરવા માટે મેડિકલનું અણીવાળુ સાધન) ઉપયોગ કરો

- એલ્કોહોલના લૂછણિયા સાથે તમારી આંગળી સાફ કરો - અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમારા ઉપયોગમાં નહિ લેવામાં આવતા હાથની ત્રીજી આંગળીનો ઉપયોગ કરો.
- લાન્સિટના નીચેના ભાગમાં રક્ષણાત્મક ટિપ કે અણીને દૂર કરવા: ટિપને વળ ચડાવો કે ટવિસ્ટ (એક સંપૂર્ણ વળાંક કે ટર્ન) અને ત્યારબાદ તેને આખી બહાર ખેંચો.
- કોઈ એક કઠણ સપાટી ઉપર તમારા હાથનો ઉપરનો ભાગ (ટેબલના ઉપરના ભાગ માફક) મૂકો.
- તમારી આંગળીની ટોચના બહારના કેન્દ્ર ઉપર લાન્સિટને નીચે દબાવો
- જ્યાં સુધી તમે ક્લિક અવાજ સાંભળો ત્યાં સુધી જાંબૂડિયા (પર્પલ) બટન ઉપર જોરથી દબાવો. તમે દરેક લાન્સિટનો ફક્ત એકજ વાર ઉપયોગ કરી શકો.

2. ટ્યૂબ કે નળીને ભરો

- કોઈ એક સ્વચ્છ ટિશ્યૂ સાથે લોહીના પહેલા ટીપાને લૂછી નાખો.
- દર ૩ થી ૪ સેકન્ડે તમારા હાથને નીચેની ગતિમાં જોરથી મસાજ કરો. તમારા હાથની હથળેથી શરૂઆત કરી તમારી આંગળી સુધી નીચે આવો. પણ જ્યાં છેદ કે વિંધવામાં આવ્યું હોય ત્યાં દાબશો નહિ અથવા તે તમારા નમૂનાને કદાચ બગાડી શકે.
- જો લોહી વહેતું બંધ થાય તો, લોહીના પ્રવાહને ઉદીપ કરવા (સ્ટિમ્યુલેટ) છેદ કરવામાં આવેલ આંગળીને લૂછવા દબાણનો ઉપયોગ કરો. જો આ કાર્ય ન કરે તો, અને તે ૨ મિનિટો કરતા વધારે સમય થયો છે તો, તમારા હાથને ફરીથી ગરમ- હુંકુવાળા કરી અને બીજી આંગળીને છેદ કરવા નવા લાન્સિટનો ઉપયોગ કરો.

3. ટ્યૂબને મિશ્ર કરો

ટ્યૂબમાં 600 લાઈન કે લીટી સુધી ભરો. જો તમે ફક્ત 400 લીટી સુધી ભરશો તો, તે ઓકે બરાબર રહેશે. કેપને ટ્યૂબ ઉપર રાખો. જ્યાં સુધી તે ક્લિક થાય ત્યાં સુધી તેને દબાવો. 1. હળવેથી ટ્યૂબને ઊંધી કે ઉપરના ભાગને ફેરવો. ટ્યૂબમાં 600 લાઈન કે લીટી સુધી ભરો. જો તમે ફક્ત 400 લીટી સુધી ભરશો તો, તે ઓકે બરાબર રહેશે. કેપને ટ્યૂબ ઉપર રાખો. જ્યાં સુધી તે ક્લિક થાય ત્યાં સુધી તેને દબાવો.



- ઓછામાં ઓછી 10 વખત ટ્યૂબને ઊંધીચતી કરશો. ખાતરી કરશો કે લોહી ટ્યૂબની બાજુએ સ્પર્શ કરે છે.
- જયારે મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે જો લોહીનું ધનીકરણ (સોલિડિફાઈ) થાય તો ચિંતિત બનશો નહિ. આવું બનવાની ધારણા રાખવામાં આવે છે.
- લોહી વહેવાનું બંધ કરવા માટે આંગળી ઉપર દબાણ લાવો, સ્વચ્છ કરતા લૂછણિયાથી સાફ કરી, અને પ્લાસ્ટર લગાવો.
- ઢોળાયેલ કે વેરાયેલ લોહીને તાત્કાલિક સાફ કરી અને આજુબાજુના વિસ્તારને જંતુમુક્ત કરશો.

લેબલ અને પોસ્ટ

- પરત કરેલ ફોર્મમાંથી તમારા ટ્યૂબ લેબલને ઉખાડી અને તમારી ટ્યૂબની આજુબાજુમાં વીંટો કે લગાવો. ખાતરી કરો કે છાપેલ કોડ જોઈ શકાય તેમ હોય છે.
- નમૂનો ટ્રેનસ્પોર્ટ કરવા માટે 95 kPa લેબલવાળી સ્વચ્છ પ્લેસ્ટિક બેગ મેળવો. લાન્સિટ અને ટ્યૂબ સ્લોટ મારફતે મૂકો — કે જે ચલો - પીળા સ્ટિકર વચ્ચે મળશે. આવી બેગનો ઉપરનો ભાગ સપાટ હોવાથી, સ્ટિકરને દૂર કરી

- અને સ્ટિકી બેકીંગ ઉપર ફલેપને ફોલ્ડ-કરો કે વાળો. મધ્યમાંથી બહાર સુધી દબાવી સારી રીતે સીલ કરો.
- તમારા પરત કરવાના ફોર્મ ઉપર સમય અને તારીખ ભરો. જે બોક્સમાંથી તમારી કિટ આવેલ હોય તેમાં ફોર્મ અને સ્વચ્છ પ્લેસ્ટિક બેગ (ટ્યૂબના સમાવેશ સાથે) મૂકી અને બંધ કરો.

- પૂર્વચૂકવણીવાળા પરબીડિયામાં બોક્સને મૂકો.
- NHS લોગો સાથે અગ્રતાવાળા પોસ્ટબોક્સમાં તમારો નમૂનો મૂકો. તમારા સૌથી નજીકના અગ્રતાવાળા બોક્સ માટે www.royalmail.com/services-near-you. માહિતી મેળવો. જો તમને સુરક્ષિતરીતે અગ્રતાવાળા બોક્સ સુધી જઈ ન શકો તો, તમારા સ્થાનિક પોસ્ટબોક્સનો ઉપયોગ કરશો.
- તમામ ઉપકરણોનો સલામત રીતે નિકાલ કરો.

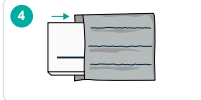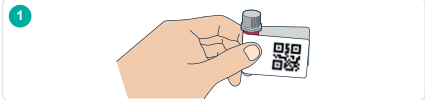

ચિહ્નો

	સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રહો		ઉપયોગ માટે સૂચનાઓની સલાહ લો
	વરસાદથી દૂર રહો		યુરોપિઅન અનુસરણ (કોનફોર્મિટિ)
	ફરીથી ઉપયોગ ન કરવો		ઉત્પાદક
	ઉષ્ણતામાન મર્યાદા 25°C		બેચ કોડ
	ઈન વિટ્રો ડાયગ્નોસ્ટિક તબીબી સાધન		તારીખ સુધીના ઉપયોગ માટે ટ્યૂબો તપાસો

- આ એક ઈન વિટ્રો ડાયગ્નોસ્ટિક તબીબી સાધન છે.
- તમારી કિટમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ સાધનનો ફક્ત ઉપયોગ કરો.
- આ કસોટી કે ટેસ્ટ ઓર્ડર કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા અવશ્ય હાથ ધરવામાં આવેલી જોઈએ અને લેબલ થવું જોઈએ.
- ચેપના ચિહ્નો માટે ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો તમારા ધાની જગ્યા લાલ, ગરમ, અથવા સોજો થાય તો, તબીબી સલાહનો પ્રયત્ન કરો.
- આ કિટ 18 અને તેનાથી ઉપરની વચના લોકો માટે છે.
- જો લોહી બંધ ન થાય તો જોરથી દબાણ આપી તમારા હાથ ઊંચા કરો. જો આ કામ ન કરે તો, તબીબી સલાહનો પ્રયત્ન કરો.
- જો તમને મૂર્છા લાગે તો, સૂઈ જાઓ અને તમારા પગો ઊંચા કરો. જો તમને અસ્વસ્થતા લાગવાનું ચાલુ રહે તો, તબીબી સલાહનો પ્રયત્ન કરો.
- જો તમે એન્ટિકોએગ્યુલેશન (પ્રતિસ્કંદક) દવા લેતા હો તો વધારે લોહી નીકળવાનો જોખ - ભય રહે છે.
- કિટને બાળકો, પ્રાણીઓ, સૂર્યના પ્રકાશ, આગ અને ધૂમાડાથી દૂર રાખો.
- જો બહારનું ઉષ્ણતામાન 25°C થી ઉપર હોય તો તમારા નમૂનાને પોસ્ટ કરશો નહિ.
- તે ખૂબજ અસંભવિત છે, પણ ગૂંચવણો થવાનો થોડોક જોખમ - ભય હોય છે — કે જેમાં ડાઘનો, હેમેટોમા (લોહીનો સંગ્રહ), શાનતંતુને નુકસાન, અને નેક્રોસિસનો (ત્વચાના કોષોનું અકાળ મૃત્યુ) સમાવેશ થાય છે.

! પૂરતું લોહી મળી શકે તેમ નથી?

મદદ- સહાય માટે જાઓ www.gov.uk/taking-antibody-blood-sample. જો તમને નમૂનાના ભાગ- અંશનો નિકાલ કરવાની જરૂર રહે તો, સામાન્ય નમૂના માટે જેમ કરો તે પ્રમાણે પેક કરવા સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરી (કે જેમાં પરબીડિયાનો સમાવેશ થાય છે). ત્યારબાદ ઘરગથ્થુ કચરામાં તે બધાનો નિકાલ કરો.