


Przed rozpoczęciem testu należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Ten test może różnić się od tych, z których korzystałeś(-aś) wcześniej.

Twoja instrukcja krok po kroku do Szybkiego Testu Antygeny SureScreen SARS-CoV-2 w kasecie (Wymaz z nosa) (zawierający złoto)

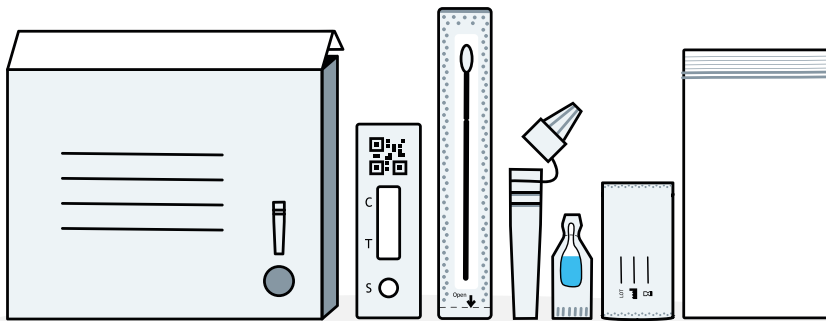

Te instrukcje dotyczą Szybkiego testu antygeny SureScreen SARS-CoV-2 w kasecie (Wymaz z nosa) (zawierającego złoto), kod produktu: COVID19AGVCGS7.

Poradnik wyjaśnia, jak przeprowadzić u siebie, swojego dziecka lub innej osoby test na COVID-19, i jak zgłosić uzyskane wyniki.

Alternatywne wersje językowe i prezentacje wideo są dostępne na:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Przeznacz wszystkie wyniki swoich testów do NHS

Co trzeba zrobić

Instrukcja krok po kroku

Przeczytaj te instrukcje i wykonaj kroki we właściwej kolejności. Przygotowanie każdego testu zajmuje około 15 minut a wyniki będą gotowe po 10 minutach.



1	Przygotuj obszar testowy i sprawdź zawartość zestawu	strona 6
2	Przygotuj swój test	strona 8
3	Pobierz próbkę wymazu	strona 10
4	Zbadaj próbkę wymazu	strona 12
5	Odczytaj swój wynik	strona 14
6	Przeznacz swój wynik	strona 15
7	Co oznacza Twój wynik	strona 16
8	Wykonanie testu	strona 17
9	Bezpieczna utylizacja zestawu do testu	strona 17

W przybliżeniu, co 3 osoba zakażona wirusem COVID-19 nie wie że się zaraziła.

Porady dotyczące wykonania testu

Wskazówki dotyczące przechowywania i obsługi

- Przechowywać w opakowaniu, w temperaturze pokojowej (2-30°C). Nie zamrażać.
- Zestaw należy stosować w temperaturze pokojowej (od 15° do 30°C). Jeśli zestaw był przechowywany w niskiej temperaturze (poniżej 15°C), przed użyciem należy go pozostawić na 20 minut w normalnej temperaturze pokojowej.
- Użyj osobnego zestawu testowego dla każdej osoby. Każdego przedmiotu z zestawu testowego można użyć tylko raz. Nie należy używać ponownie elementów zestawu. Należy zgłosić wynik każdej osoby.
- Jeśli masz problemy z rękami lub wzrokiem, możesz potrzebować kogoś, kto pomoże Ci w dokonaniu wymazu i przeprowadzeniu testu.
- Jeśli masz kolczyk w nosie, zdejmij go przed wykonaniem wymazu.
- Unikaj używania próbek zawierających krew. Osoba, u której w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiło krwawienie z nosa powinna 24 godziny przed wykonaniem testu.
- Kiedy trzymasz wymazówkę, nie dotykaj jej główki.
- Unikaj dotykania obszaru zestawu testowego i okienka wyników, w których dodaje się próbkę.

Ostrzeżenia

- Nie używaj po upływie terminu przydatności. Należy przestrzegać daty ważności wskazanej na pudełku.
- Do czasu użycia kasetę powinna pozostać w zamkniętym woreczku.
- Te zestawy są przeznaczone wyłącznie do użytku u ludzi.
- Przez 15 minut przed badaniem nie należy stosować aerozoli do nosa.
- Produkt nie został wykonany z lateksu naturalnego, jednak nie można całkowicie wykluczyć obecności lub śladowych ilości lateksu naturalnego w produkcie dostarczonym użytkownikowi końcowemu.

Należy starannie przestrzegać tych instrukcji, ten test może różnić się od tych, z których korzystałeś(-aś) wcześniej.

Kod produktu: COVID19AGVCGS7.

Przeznacz wszystkie wyniki swoich testów do NHS

O tym teście

DLaczego przeprowadzić samodzielnie wykonywany test?

Ten zestaw do testu na COVID-19, służy do samodzielnego przeprowadzenia testu wymazowego z nosa. Może być wykonywany u osób, które nie mają żadnych objawów, należy jednak postępować zgodnie z krajowymi wytycznymi, i sprawdzić jaki rodzaj testu jest odpowiedni w danej sytuacji.

W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 należy:

- Pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie choroby i rozpocząć izolację swoją i całego gospodarstwa domowego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
- Poinformuj osoby, z którymi byłeś(-aś) w bliskim kontakcie i miejsca, które odwiedziłeś(-aś) w ciągu ostatnich 48 godzin przed wystąpieniem objawów, lub przed pozytywnym wynikiem testu, jeśli nie masz żadnych objawów, aby mogli sprawdzić czy się nie zarazili COVID-19. Zawsze stosuj się do lokalnych i krajowych wytycznych.

W razie negatywnego wyniku testu na COVID-19

Jest prawdopodobne, że w czasie wykonywania testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny wynik testu nie gwarantuje jednak, że nie masz koronawirusa. Nadal należy przestrzegać wytycznych rządowych.

PORADA

Jeśli masz obawy, nie zwlekaj ze zwróceniem się o pomoc. Zaufaj instyktowi.

Jeśli masz objawy COVID-19 lub zarażyłeś(-aś) się COVID-19, stosuj się do wytycznych NHS: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


Jeśli masz objawy COVID-19, a Twój stan się pogarsza lub nie poprawi się po siedmiu dniach, skontaktuj się dzwoniąc pod nr NHS - 111 lub skorzystaj z witryny internetowej ds. koronawirusa 111.nhs.uk

Jeśli nie masz dostępu do internetu, zadzwoń pod numer **NHS 111**.

W nagłych wypadkach medycznych zadzwoń pod **999**.

Więcej porad na temat objawów wirusa COVID-19 u dzieci można uzyskać pod adresem: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

Dla kogo ten test jest odpowiedni?

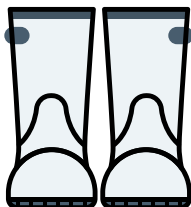

Dorośli 18+

Samodzielny test i zgłoszenie, w razie potrzeby z pomocą.



Młodzież - 12-17 lat

Samodzielny test i zgłoszenie pod nadzorem dorosłego. W razie potrzeby test może przeprowadzić dorosły.



Dzieci poniżej 12 roku życia

U dzieci poniżej 12 roku życia test powinna przeprowadzić osoba dorosła. Nie przeprowadzaj tego testu, jeśli czujesz się niepewnie wykonując go u dziecka. Nie kontynuuj testu, jeśli dziecko odczuwa znaczący dyskomfort lub ból.

Jak często przeprowadzać ten test

To jak często należy przeprowadzać ten test zależy od okoliczności i aktualnych wytycznych krajowych lub lokalnych.

Gdzie można znaleźć dodatkowe wsparcie

Więcej informacji na temat samodzielnego testu znajdziesz na:
[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Instrukcje w tej broszurze dotyczą wyłącznie Szybkiego testu SARS-CoV-2 w kasie (Wymaz z nosa) (zawierającego złoto), kod produktu: COVID19AGVCGS7.

Kod produktu: COVID19AGVCGS7.

Przeżaj wszystkie wyniki swoich testów do NHS

1. Przygotuj miejsce do testu

WAŻNE

Zestaw należy stosować w temperaturze pokojowej (od 15°C do 30°C). Jeśli zestaw był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, przed użyciem należy go pozostawić w normalnej temperaturze pokojowej na 20 minut.




Przez 15 minut przed badaniem nie należy stosować aerozoli do nosa.



15
minut

Będziesz potrzebować: timer, (np. w formie zegarka lub budzika), chusteczek, środka do dezynfekcji rąk lub mydła i ciepłej wody.

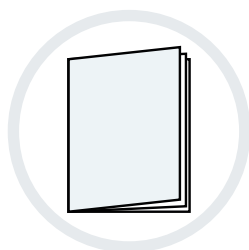

- 1** Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.



- 2** Opróżnij, wyczyść i osusz płaską powierzchnię bezpośrednio przed rozpoczęciem testu.




- 3** Myj ręce starannie przez 20 sekund, używając mydła i ciepłej wody lub środka do dezynfekcji rąk.


Instrukcje w tej broszurze dotyczą wyłącznie Szybkiego testu antygeny SureScreen SARS-CoV-2 w kasecie (Wymaz z nosa) (zawierającego złoto)

Sprawdź zawartość zestawu

4 W pudełku testowym powinny się znaleźć:

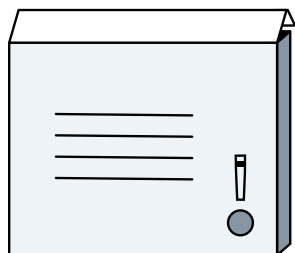

Pudełko zewnętrzne z uchwytem na probówkę

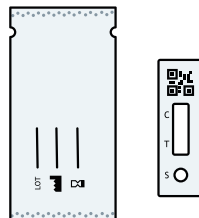


Kaseta testowa w hermeticznym opakowaniu




Saszetki z płynem (fiolki z buforem ekstrakcyjnym)



Probówki ekstrakcyjne

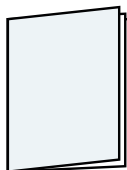

Instrukcje użycia (ta broszura)

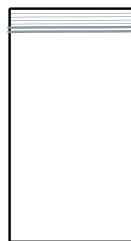

Torby ze sztucznego tworzywa na odpady



Wymazówki

PORADA

Co zrobić, jeśli coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje?


Jeśli zauważysz, że coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje nie używaj zestawu testowego. Możesz zgłosić problem, dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

Zadzwoń pod nr: **119** (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych). Oferujemy wsparcie w 200 językach, a także w brytyjskim języku migowym.

Jeśli korzystanie z urządzenia doprowadzi do obrażeń zgłoś to na:

[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

2. Przygotuj test

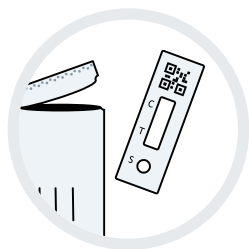


- 5** Wyjmij kasetę testową z hermetycznego woreczka i umieść ją na czystej płaskiej powierzchni.




OSTRZEŻENIE

Po otwarciu należy użyć w ciągu 1 godziny, w przeciwnym razie test będzie unieważniony. Należy zutylizować kasetę i zawartość woreczka, które były poza hermetycznie zamkniętym woreczkiem dłużej niż 1 godzinę.

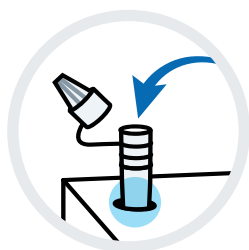

- 6** Umieść próbkę ekstrakcyjną w uchwycie na próbkę ekstrakcyjną (perforowany okrągły obszar na wieczko pudełka), aby uniknąć rozlania płynu.

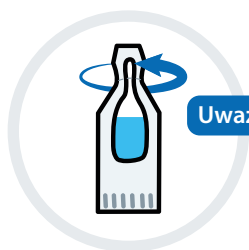

- 7** Ostrożnie przekręć, aby otworzyć saszetkę z płynem. Otwórz ją z dala od twarzy i uważaj, by nie rozlać płynu.

OSTRZEŻENIE

Bufor ekstrakcyjny zawiera materiały, które mogą powodować podrażnienie w przypadku kontaktu z twarzą lub skórą. Jeśli roztwór wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, przemyj dużą ilością wody. Jeżeli dojdzie do podrażnienia skóry zwróć się o pomoc lekarską.



- 8** Otwórz próbkę ekstrakcyjną i delikatnie wyciśnij cały płyn z saszetki do próbki.

Zachowaj ostrożność i umieść pustą saszetkę po płynie w dostarczonej plastikowej torbie na odpady.




- 9** Delikatnie wydmuchaj nos w chusteczkę i wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza.

Jeśli pomagasz komuś innemu lub badasz dziecko, pomóż mu wydmuchać nos i wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza.



- 10** Ponownie dokładnie myj ręce przez 20 sekund, używając mydła i ciepłej wody lub użyj środka dezynfekującego.


Jeżeli pomagasz komuś innemu lub przeprowadzasz test u dziecka, pomóż w umyciu rąk.

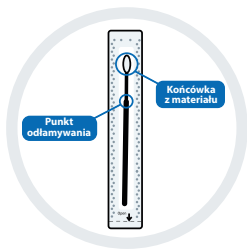

- 11** Znajdź wymazówkę w szczelnie zamkniętym opakowaniu przed sobą. Zidentyfikuj miękką, materiałową końcówkę.

WAŻNE

Nie dotykaj miękkiej, materiałowej końcówki wymazówki. Jeśli końcówka wymazówki została dotknięta, wyrzuć wymazówkę.

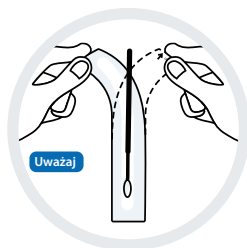


- 12** Delikatnie oderwij opakowanie wymazówki na drugim końcu, dopiero gdy będziesz gotowy(-a) do użycia.

3. Pobierz próbkę wymazu


Jeśli przeprowadzasz test u innej osoby, zapoznaj się z instrukcjami na stronie 11.

WAŻNE

Test należy wykonać wyłącznie z użyciem wymazu pobranego z nosa.

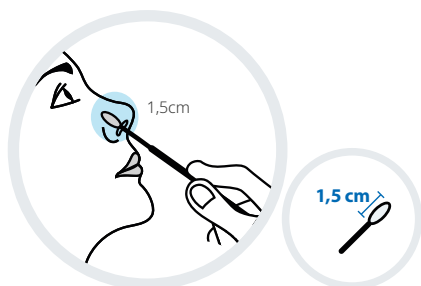


- 13** Wprowadź końcówkę wymazówki nieznacznie w głąb jednego nozdrza (na około 1,5 cm w głąb nosa).

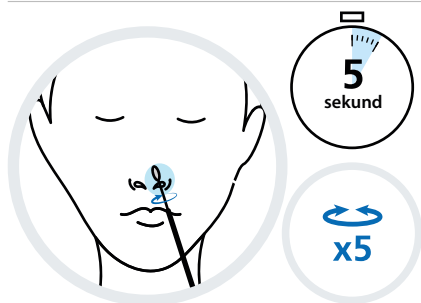

- 14** Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza okrężnymi ruchami **5 razy** przez co najmniej **5 sekund**.

Powoli wyciągnij. Nie trzeba używać siły ani wciskać wymazówki zbyt głęboko w nozdrze. Nie wkładaj wymazówki do oryginalnego papierowego opakowania.

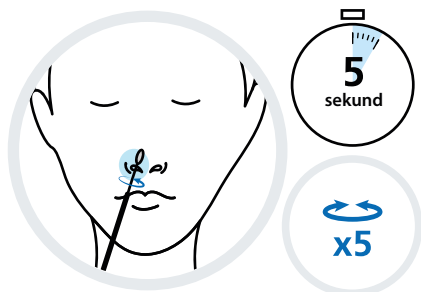


- 15** Używając tej samej wymazówki, wprowadź końcówkę nieznacznie do drugiego nozdrza (czyli na około 1,5 cm wgłąb nosa).

Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza okrężnymi ruchami **5 razy** przez co najmniej **5 sekund**.


Przeprowadzenie testu u kogoś innego

PORADA


W wykonaniu testu u dziecka poniżej 12 roku życia powinna pomóc osoba dorosła. Zastosuj się do poniższych wskazówek przygotowania i przeprowadzenia testu u dziecka. Film demonstracyjny można obejrzeć na stronie: gov.uk/covid19-self-test-help

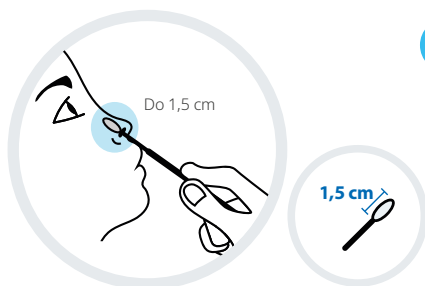

- 13** Jeżeli przeprowadzasz test u dziecka, pokaż mu zestaw testowy i porozmawiaj z nim o tym, co będziesz robić. W miarę możliwości poproś dziecko by usiadło Ci na kolanach lub by ktoś przytrzymał je za rękę.

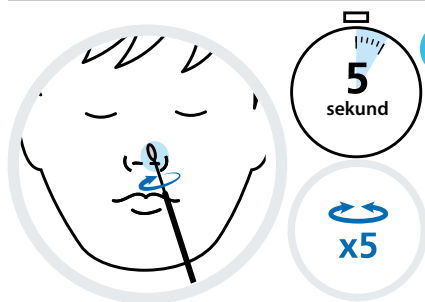

- 14** Włóż materiałową końcówkę wacika nieco włąb nozdrza tej osoby (na około 1,5 cm), lub do poczucia oporu. Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza okrężnymi ruchami **5 razy** przez co najmniej **5 sekund**. Powoli wyciągnij wymazówkę. Nie trzeba używać siły ani wciskać wymazówki zbyt głęboko w nozdrze badanego. Nie wkładaj wymazówki do oryginalnego papierowego opakowania.

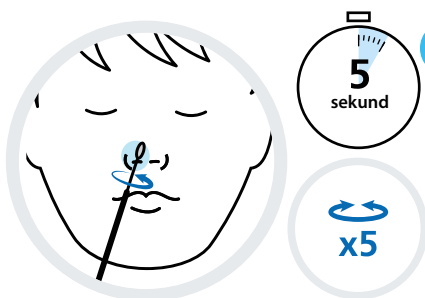


- 15** Wprowadź materiałową końcówkę tej samej wymazówki nieznacznie do drugiego nozdrza (na około 1,5 cm), lub do poczucia oporu. Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza okrężnymi ruchami **5 razy** przez co najmniej **5 sekund**.

4. Zbadaj próbkę wymazu

WSKAZÓWKA

Aby uzyskać najpewniejszy wynik, przetestuj wymaz najszybciej jak to możliwe po pobraniu.

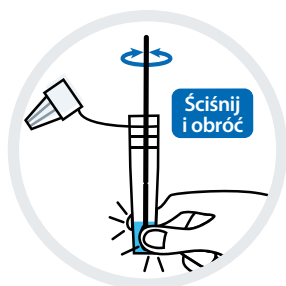

- 16** Chwyć probówkę ekstrakcyjną i umieść materiałową końcówkę wymazówki w probówce ekstrakcyjnej, aby była zanurzona w płynie.


Mocno dociśnij główkę wymazówki do wnętrza probówki, ściskając spód probówki kciukiem i palcami.

Podczas ściskania obracaj wacikiem przez co najmniej 10 sekund.




- 17** Lekko unieś wymazówkę, a następnie odłam wymazówkę w „punkcie odłamywania”. Pozostaw główkę wymazówki w probówce ekstrakcyjnej.

Umieść uchwyt wymazówki w dostarczonym worku na odpady.

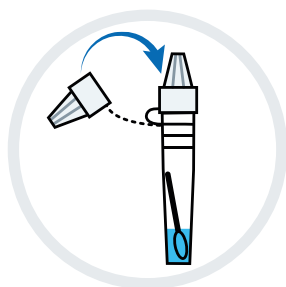


- 18** Nałóż zatyczkę zakraplacza szczelnie na górną część probówki ekstrakcyjnej.

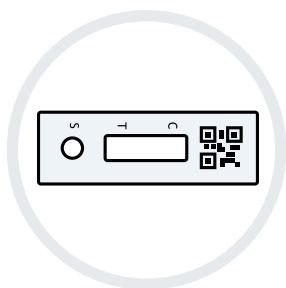

- 19** Upewnij się, że kasetka testowa znajduje się na czystej i płaskiej powierzchni.


Nie przesuwaj kasetki podczas testu.

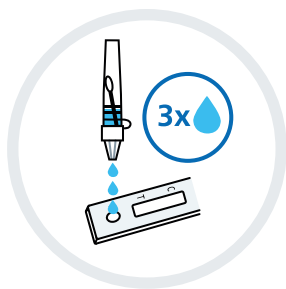

- 20** Delikatnie ściśnij probówkę ekstrakcyjną, aby umieścić 3 krople płynu w dołku próbki (S) na pasku testowym.

Upewnij się, że upuszczasz płyn, a nie pęcherzyk powietrza.

Włóż probówkę ekstrakcyjną do worka ze sztucznego tworzywa na odpady.

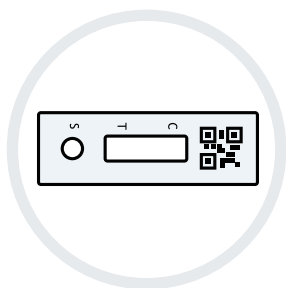

- 21** Ustaw minutnik i odczekaj 10 minut, zanim odczytasz wynik.

Nie przeność test w trakcie przeprowadzania. Odczytaj wynik po 10 minutach. Nie odczytuj po upływie 20 minut.

Zanim odczytasz wynik testu, musisz odczekaj pełne 10 minut na wyniki.



5. Odczytaj swój wynik


WAŻNE



Poczekaj aż upłynie 10 minut aby odczytać wynik.



Nie pozwól, aby test działał dłużej niż **20 minut**. Spowoduje to unieważnienie wyników testu.

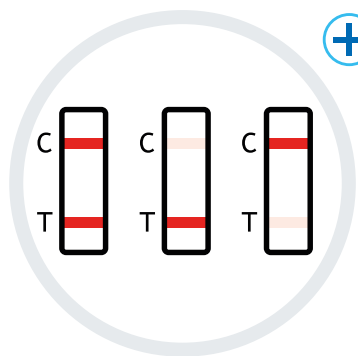


Wynik pozytywny

Pojawiają się dwie linie. Jedna kolorowa linia powinna być w obszarze linii kontrolnej (C), a druga kolorowa linia powinna znajdować się w obszarze linii testowej (T).

Dwie linie, jedna obok C i jedna obok T, nawet jeśli są słabe, wskazują pozytywny wynik testu.


WAŻNE

Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy się izolować, a całe gospodarstwo domowe powinno się zastosować do rządowych wytycznych dotyczących samoizolacji: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

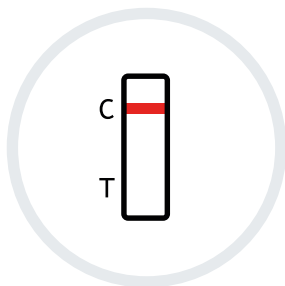

Wynik negatywny

W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia się jedna kolorowa linia. W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się żadna linia.

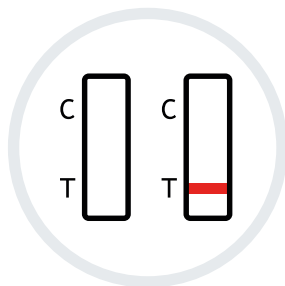


Nieważny wynik

Nie pojawia się linia kontrolna (C).

6. Zgłoś swój wynik

Należy zgłosić wynik do NHS, niezależnie czy jest pozytywny, negatywny czy nieważny.

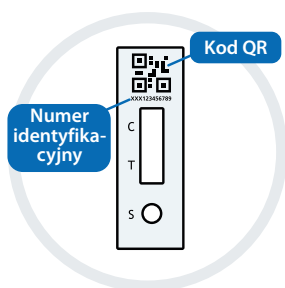


Rejestrowanie wszystkich wyników testów pomaga naukowcom wykrywać nowe epidemie wirusów i doradzać, jak zareagować.

Kiedy ludzie zgłaszają tylko pozytywne wyniki, poziom zakażeń sprawia wrażenie wyższego niż w rzeczywistości. Więc nawet jeśli Twój wynik jest negatywny lub nieważny, upewnij się, że NHS otrzyma dokładne informacje. Do zgłoszenia wyniku potrzebny jest kod QR lub znajdujący się pod nim numer identyfikacyjny.



Zgłoś online (najszybsze)
Jeśli mieszkasz w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej wejdź na: [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na: [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

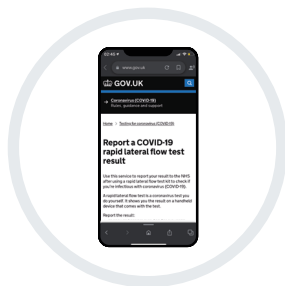

Lub zgłoś telefonicznie

Jeśli nie możesz zgłosić swojego wyniku online, zadzwoń pod nr **119** (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych).

Linie czynne są codziennie. od 7:00 do 23:00

Kod produktu: COVID19AGVCGS7.

Przełącz wszystkie wyniki swoich testów do NHS

7. Co oznacza Twój wynik

Test uważa się za ukończony dopiero po zgłoszeniu wyniku

+ Wynik pozytywny

Jeśli masz wynik pozytywny, prawdopodobnie jesteś zarażony(-a) wirusem COVID-19 i możesz zarażać innych. Powinieneś/powinnaś się samoizolować. Kiedy zgłosisz swój wynik, otrzymasz dalsze informacje na temat kolejnych kroków, które należy podjąć.

OSTRZEŻENIE

Ty i każdy, kto mieszka z Tobą powinien stosować się do aktualnych wytycznych krajowych i lokalnych. Można je znaleźć pod adresem:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

- Wynik negatywny

Jeśli wynik testu jest negatywny, prawdopodobne jest, że w czasie wykonywania testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny wynik testu **nie gwarantuje jednak, że nie jesteś nosicielem COVID-19.**

Jeśli wynik testu jest negatywny, należy nadal przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów i wytycznych, włącznie z regularnym myciem rąk, dystansem społecznym i noszeniem maseczki, jeśli jest to wymagane.

W razie wystąpienia objawów, należy się samoizolować i wykonać test aktualnie zalecany na: gov.uk/get-coronavirus-test lub zadzwonić do centrum kontaktu z klientem na nr 119. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

Wraz z innymi członkami gospodarstwa domowego należy przestrzegać wytycznych krajowych.

Nieważny wynik

Wynik nieważny oznacza, że nie można powiedzieć, czy podczas wykonywania testu miałeś(-aś) wirusa. Możliwie jak najszybciej należy użyć kolejnego testu z pakietu. Nie używaj ponownie żadnych elementów pierwszego zestawu i rozpocznij procedurę testową od kroku 1.

Jeśli problem będzie się powtarzał, zaprzestań używania zestawów testowych. Zamów nowe opakowanie zestawów testowych na: gov.uk/get-coronavirus-test, za pośrednictwem aplikacji NHS COVID-19 lub dzwoniąc do centrum obsługi klienta pod numer **119**. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

8. Wykonanie testu

Pozytywny wynik testu jest bardziej prawdopodobny, jeśli ktoś ma wysoki poziom koronawirusa (COVID-19). Oznacza to, że najbardziej prawdopodobne jest wykrycie u osoby, które obecnie zakaża innych i potrzebuje natychmiastowej samoizolacji.



9. Bezpieczna utylizacja testu

Po zakończeniu testu wrzuć całą zużytą zawartość zestawu testowego do dostarczonego worka na odpady i wyrzuć ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Po utylizacji starannie umyj ręce.

Informacje zawarte w tej broszurze są aktualne na dzień (29 września 2021 r.).

Kod produktu: COVID19AGVCGS7

Nazwa produktu: Szybki test antygenowy SureScreen SARS-CoV-2 w kasecie (Wymaz z nosa) (zawierający złoto)

Zanotuj wynik swojego testu

To tylko do Twojej wiadomości. Nadal należy zgłosić wynik do NHS (patrz informacje na stronie 15).

Wejść na: gov.uk/report-covid19-result

Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na: covidtest.scot

U kogo przeprowadzono test	Data	Godzina	Wynik testu

Zestaw zawiera następujące materiały

Elementy	7-pak
Instrukcja użycia (ta broszura)	1
Kaseta testowa w hermetycznym opakowaniu	7
Saszetki z płynem (fiolki z buforem ekstrakcyjnym)	7
Probówki ekstrakcyjne	7
Wymazówki	7
Torby ze sztucznego tworzywa na odpady	7

Podsumowanie dalszych informacji

Dodatkowe wsparcie dla samodzielnie wykonywanych testów Alternatywne wersje językowe i filmy demonstracyjne Wskazówki dotyczące przygotowania i testowania dziecka	gov.uk/covid19-self-test-help
Poradnik dotyczący samoizolacji i informacje o leczeniu	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
Wytyczne NHS dotyczące COVID-19	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
Jeśli masz objawy COVID-19, a Twój stan się pogarsza lub nie poprawi się po siedmiu dniach, skontaktuj się z internetową infolinią NHS ds. koronawirusa - 111	111.nhs.uk Lub zadzwoń do infolinii NHS 111, jeśli nie masz dostępu do Internetu
COVID-19 - objawy u dzieci	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children
Jeśli korzystanie z urządzenia doprowadzi do obrażeń zgłoś to na:	coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Zgłoś wynik online (Anglia, Walia lub Irlandia Północna):	gov.uk/report-covid19-result
Zgłoś wynik online (Szkocja):	covidtest.scot
Zamów aktualnie zalecany test	gov.uk/get-coronavirus-test
Coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje Obsługa języków (w tym brytyjskiego języka migowego) Zgłoś swój wynik (jeśli nie masz dostępu do Internetu)	Zadzwoń pod nr 119

Dostawa tego urządzenia jest dozwolona wyłącznie w ramach dystrybucji prowadzonej przez Departament Zdrowia i opieki społecznej (DHSC) w ramach programu NHS Badanie i Śledzenie.



Producent:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park, Derby,
DE1 3QB, United Kingdom (Wielka Brytania).



Informacje o wymazówce:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Adres: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China (ChRL)
sau



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adres: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (ChRL)



Symbole



Przechowywać w temp.
2 – 30°C



Sterylizowane
tlenkiem etylenu



Producent

Nie używać
produktu kiedy
opakowanie jest
uszkodzone



Nr partii



Data ważności



Wyrób medyczny
do diagnostyki
in vitro



Sprawdź
instrukcje
użytkowania



Zawiera
materiały
na 7 testów



Nie używać
ponownie



Zapoznaj się
z sekcją „Porady
dotycząca
wykonywania
testu” zawierająca
ogólne wskazówki
i ostrzeżenia



Numer
katalogowy

Wersja 5 Data wejścia w życie 29/09/2021

Instrukcje te dotyczą Szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 w kascecie (Wymaz z nosa) (zawierający złoto), producenta: SureScreen Diagnostics o kodzie produktu: COVID19AGVCGS7