

Testarea personalului de îngrijire la domiciliu

Cum funcționează testarea

Recoltați o probă cu un bețișor cu tampon de vată în aceeași zi a fiecărei săptămâni. Asigurați-vă că recoltați, înregistrați și expediați prin poștă testul în aceeași zi. Asigurați-vă că dispuneți de tot ce aveți nevoie înainte de a recolta proba, inclusiv eticheta de returnare prin Royal Mail.

La fiecare 4 săptămâni ridicați 4 kituri de testare de la organizația dvs.

La fiecare 7 zile recoltați proba, înregistrați și expediați un kit de testare


Expediați testul doar între **joi și duminică**

Înainte de testare, asigurați-vă că:

- obțineți numărul unic de organizație (MCO) / unique organisation number) de la agenția de îngrijire la domiciliu
- citiți instrucțiunile furnizate în kitul de testare
- verificați orele de colectare a corespondenței la cea mai apropiată cutie poștală prioritară a Royal Mail

Puteți face acest lucru la: www.royalmail.com/services-near-you

1 Efectuați testul cu bețișor cu tampon de vată la fiecare 7 zile

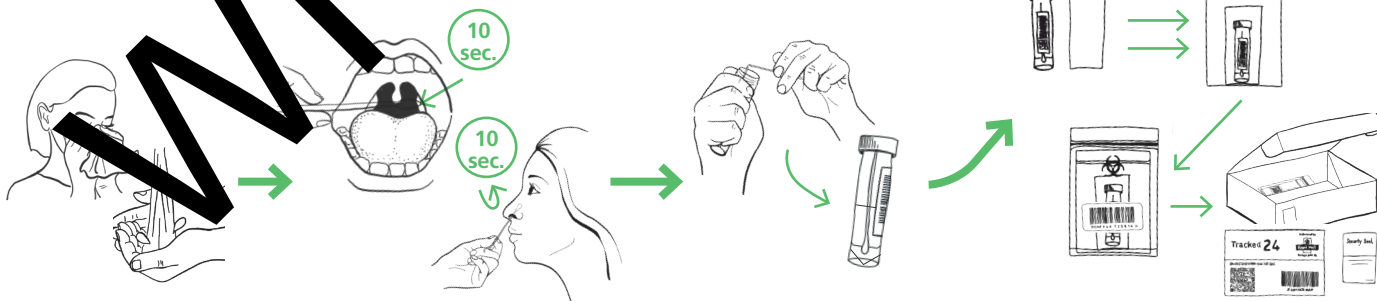

Suflați nasul și spălați-vă pe mâini înainte de testare.

Recoltați proba din gât și nas menținând bețișorul timp de 10 secunde pentru fiecare.

Puneți bețișorul cu tampon de vată în tubul de plastic cu capacul bine fixat. Tamponul trebuie să se potrivească în interior, fără să se îndoie.

Puneți tubul cu tamponul de vată într-o pungă zip-lock, apoi în punga pentru risc biologic cu codul de bare corespunzător. Ambalați punga pentru risc biologic în cutia de returnare furnizată, asigurați cutia cu sigiliul de securitate și lipiți pe cutie eticheta de returnare prin Royal Mail.

2 Înregistrați online kitul dvs. de testare

Înregistrați online kitul dvs. de testare la:
www.gov.uk/register-organisation-tests

Pentru a vă înregistra, veți avea nevoie de **numărul unic al organizației de îngrijire la domiciliu (UON)**



3 Depuneți kitul de testare la cutia poștală prioritară a Royal Mail în aceeași zi în care ați efectuat recoltarea

Depuneți kiturile cu probe cu cel puțin **1 oră** înainte de ultima oră de colectare (orele de weekend pot diferi de zilele lucrătoare).
Nu recoltați și nu expediați testul într-o zi de sărbătoare legală.

Folosiți doar o cutie poștală prioritară a Royal Mail cu eticheta și siglele NHS de mai jos



Unele cutii poștale prioritare au colectare și în zilele de duminică. Vor afișa una dintre aceste etichete:

PRIORITY POSTBOX
SATURDAY
& SUNDAY



După testare

Ar trebui să primiți rezultatul în termen de 3-5 zile. Efectuați 1 test la fiecare 7 zile.



+ Dacă obțineți un rezultat pozitiv, trebuie să

- să purtați imediat o mască de protecție a feței dacă sunteți în afara casei
- să informați managerul
- să rămâneți /întoarceți-vă acasă imediat și autoizolați-vă timp de 10 zile de la testul dvs. Vă puteți întoarce la muncă în ziua 11 dacă nu ați avut temperatură ridicată timp de 48 de ore și vă simțiți bine.



Dacă aveți întrebări, puteți

- discuta cu managerul dvs
- apela **119**

Nu întârziati să solicitați ajutor dacă sunteți îngrijorat. Aveți încredere în instinctele dvs.

Pentru asistență medicală, apelați 111. În caz de urgență, formați 999.

Pentru mai multe sfaturi, accesați bit.ly/homecare-testing