



فقط تست بینی

بسته تست 7 جریان جانبی

راهنمای گام به گام خودتست Getein Biotech COVID-19




هشدار

قطعات سایر کیت‌های تست را با هم ترکیب و سر هم نکنید.

پیش از شروع، کل این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

این تست می‌تواند با تست‌های دیگری که قبلاً داشته‌اید، تفاوت داشته باشد.

فقط تست بینی

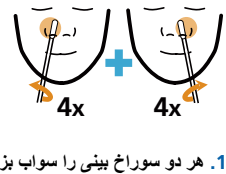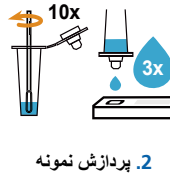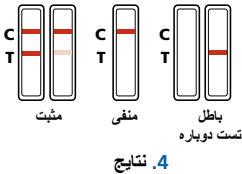

این دستورالعمل، راهنمای گام به گام انجام تست جریان جانبی Getein Biotech مربوط به COVID-19 روی خود یا افراد دیگر است. دستورالعمل تکمیلی در مورد زمان انجام تست یا گزارش نتیجه تست شما ممکن است توسط انجام‌دهنده تست شما ارائه شود.

جهت دسترسی به زبان جایگزین و سایر فرمت‌های این دستورالعمل، به آدرس زیر بروید:

gov.uk/covid19-self-test-help

این دستورالعمل مربوط به خودتست (Getein Biotech One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen) تست تک مرحله‌ای Getein Biotech برای آنتیژن (SARS-CoV-2) (طلای کلونیدی)، با کد محصول: CG206157 است.

کاری که باید انجام دهید

راهنمای گام‌به‌گام شما

این دستورالعمل را مطالعه و مراحل زیر را به ترتیب درست دنبال کنید.

چرا باید خودتست را انجام دهید

این کیت خودتست COVID-19 یک تست سواب بینی برای بررسی این است که آیا به ویروس مبتلا هستید، حتی اگر بدون علامت باشید، یا خیر.

محتوای این جزوه

2	کاری که باید انجام دهید
3	راهنمایی و تدابیر احتیاطی
4	درباره این تست
5	آماده سازی محل تست خودتان
6	بررسی محتویات کیت خود
7	انجام تست خودتان
9	انجام تست روی فرد دیگر
10	گرفتن نمونه سواب خود
11	ارزیابی نمونه سواب
13	خواندن نتایج خود

راهنمایی و تدابیر احتیاطی

- چنانچه کیت آسیب دیده یا مهر و موم آن صدمه دیده است، یا اگر به نظر می‌رسد که اجزای آن شکسته است، از هیچ یک از اجزای کیت تست استفاده نکنید.
- اجزای جعبه‌های کیت‌های تست مختلف را با هم قاطی نکنید. فقط از اجزای این کیت ارائه شده استفاده کنید چرا که مایع یک نوع تست با نوع تست دیگر کار نمی‌کند.
- کلیه بخش‌های کیت تست یکبار مصرف هستند، به‌غیر از نگهدارنده لوله استخراج. از هیچ بخش دیگری به غیر از نگهدارنده لوله استفاده مجدد نکنید.
- این کیت‌ها صرفاً برای استفاده توسط انسان طراحی شده‌اند.
- از دسترس کودکان دور نگهداری شود. این کیت تست شامل بخش‌های کوچکی است که می‌تواند خطر خفگی در پی داشته باشد.
- اگر یک یا چند قطعه تزئینی سوراخ‌کاری بینی دارید، پیش از زدن سواب آنها را بردارید.
- هنگام خارج کردن نمونه سواب، این کار را با نیرو یا فشار بیش از حد انجام ندهید و سواب را خم نکنید، چراکه ممکن است بشکند.
- اگر در هنگام سواب زدن دچار خونریزی بینی شدید، کار را متوقف کنید. چنانچه سواب خونی شود، از آن نمی‌توان برای تست استفاده کرد. قبل از انجام تست جدید، 24 ساعت صبر کنید.
- مراقب باشید کاست تست با محصولات تمیزکاری خانگی تماس نداشته باشد، چراکه می‌تواند نتیجه نادرستی ارائه دهد.
- محتویات ریخته شده از لوله پلاستیکی را توسط دستمال‌کاغذی و ماده ضد عفونی کننده خانگی پاک کنید.
- این تست می‌تواند برای افرادی که طی 6 ماه گذشته جراحی صورت یا سر داشته‌اند یا افرادی که مستعد خونریزی بینی هستند نامناسب باشد.
- اگر دست‌ها یا بینایی شما مشکل دارد، ممکن است نیاز داشته باشید کسی در کار نمونه‌برداری و انجام تست به شما کمک کند.

درباره این تست

این تست مناسب افراد زیر است:

بزرگسالان 18 ساله و بالاتر
خودتست، در صورت نیاز، با کمک.



نوجوانان 12 تا 17 ساله
خودتست تحت نظارت افراد بزرگسال (و در صورت نیاز، با کمک).



کودکان
تست کودکان 11 ساله و کمتر باید توسط فرد بزرگسال انجام شود.



نگهداری و انتقال

- این کیت تست را در دمای معمولی اتاق یا در محل خشک و خنک (4 تا 30 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید
- این کیت تست را زیر نور مستقیم خورشید یا در فریزر قرار ندهید.
- این کیت را باید در دمای اتاق (15 تا 30 درجه سانتیگراد) استفاده کنید. چنانچه این کیت در دمای کمتر از 15 درجه سانتیگراد نگهداری شده است، پیش از استفاده، به مدت 30 دقیقه آن را در دمای معمولی اتاق نگهداری کنید.

اگر علائم جدیدی از COVID-19 دارید

جهت دریافت توصیه‌های به‌روز، به [nhs.uk/coronavirus](https://www.nhs.uk/coronavirus) مراجعه کنید.

اگر نگران علائم خود هستید،

یا اگر علائم شما بدتر شد، با پزشک تماس بگیرید، از سرویس برخط NHS
111 به آدرس 111.nhs.uk بازدید کنید یا برای گفتگوی مستقیم با یک
نفر، با 111 تماس بگیرید.

در موارد اورژانس پزشکی، فوراً با شماره 999 تماس بگیرید.

هشدار

111



آماده‌سازی محل تست خودتان

چیزی که نیاز دارید: یک زمان‌سنج مانند ساعت‌مچی، ساعت‌دیواری یا تلفن همراه، دستمال‌کاغذی، پاک‌کننده سطح، ضد عفونی‌کننده دست یا صابون و آب گرم.

1 این دستورالعمل را به‌دقت مطالعه کنید.

چنانچه به کمک بیشتری نیاز داشتید، به آدرس زیر بروید:
[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)



2 پیش از آغاز تست، محل مسطحی را تمیز و خشک کنید تا کیت تست را روی آن قرار دهید.



3 دست‌ها را به مدت 20 ثانیه با صابون و آب گرم یا با ماده ضد عفونی‌کننده دست کاملاً بشویید.

اگر بیش از یک تست انجام می‌دهید، سطح را تمیز کنید و بین تست‌ها دستان خود را بشویید.



محتوای کیت خود را بررسی کنید


هشدار

اجزای سایر کیت های تست را ترکیب و سرهم نکنید.

در جعبه تست خود باید موارد زیر را داشته باشید:

7x

لوله استخراج
با محلول و
نوک استخراج
نمونه

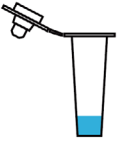

7x

SARS-CoV-2
کارت تست آنتیژن
در کاست مهر و
موم شده



7x

سواب های
استریل



7x

کیسه های
کیت



1x

جعبه با سوراخ
نگهدارنده لوله استخراج



پیش از آغاز، تاریخ انقضای روی جعبه کیت تست و کیسه مهر و موم شده (EXP) را بررسی کنید و چنانچه تاریخ انقضای کیت تست به پایان رسیده است از آن استفاده نکنید.

هشدار

انجام تست خودتان

مهم

بعد از تاریخ انقضای دستگاه تست، از آن استفاده نکنید.

4 کاست تست را از کیسه مهر و موم شده خارج کنید و روی سطحی صاف و تمیز بگذارید.

پس از باز کردن آن، تست را ظرف مدت 60 دقیقه آغاز کنید



5 لوله استخراج را از صورت خود دور نگه دارید و به آرامی روکش آببندی شده را از لوله استخراج جدا کنید تا مایع ریخته نشود.

روکش آببندی شده را با دندان جدا نکنید.

هشدار

از تماس محلول بافر با پوست خود خودداری کنید. چنانچه محلول بافر به پوست یا چشم شما رسید، آن را به خوبی با آب بشویید و در صورت سوزش به پزشک مراجعه کنید.



6 لوله استخراج حاوی بافر را وارد سوراخ نگهدارنده لوله استخراج در جعبه کنید.





7 به آرامی داخل دستمال کاغذی **فین کنید** تا مخاط اضافی تست را خراب نکند. دستمال را در سطل زباله بیندازید. اگر از کودک/فرد وابسته تست می‌گیرید، در صورت نیاز، به او کمک کنید تا فین کند.



8 پیش از لمس کردن کیت تست، **دستان خود را به مدت 20 ثانیه با صابون و آب گرم یا ماده ضدعفونی‌کننده دست کامل بشویید** تا آلوده نشوند. اگر به کودک یا فرد وابسته کمک می‌کنید، هر دوی شما باید **دست‌هایتان را برای مدت 20 ثانیه به طور کامل بشویید** یا از ماده ضدعفونی‌کننده دست استفاده کنید.



9 سواب استریل را در روکش آب بندی شده پیدا کنید. زمانی که برای آغاز آزمایش آماده شدید، بسته سواب را از انتهای پایه باز کنید.

به آرامی سواب را خارج کنید. سعی کنید با انگشت به نوک پارچه‌ای دست نزنید.



پیش از نمونه‌گیری، اجازه ندهید نوک سواب با چیزی تماس یابد، در غیر این صورت، باید کار را با یک سواب تازه شروع کنید.

هشدار

انجام تست روی فرد دیگر

تست نباید روی کودکان زیر 12 سال انجام شود. دستورالعمل مرتبط با روش آماده‌سازی و تست کودک یا افراد وابسته را در زیر دنبال کنید: gov.uk/covid19-self-test-help

کیت تست را به کودک نشان دهید و به او توضیح دهید چه کاری می‌خواهید انجام دهید. در صورت امکان، او را روی پاهای فرد دیگری بنشانید یا از کسی بخواهید دست او را بگیرد.

از کودک بخواهید در دستمال فین کند. دستمال کاغذی را درون سطل زباله قرار دهید سپس هر دو دستان خود را برای مدت 20 ثانیه با صابون و آب گرم یا ماده ضدعفونی‌کننده دست به خوبی بشویید.


اگر هنگام انجام تست راحت نیستید یا کودک از درد آن شکوه می‌کند، کار را ادامه ندهید.

10 سوراخ بینی اول

نوک پارچه‌ای سواب را وارد سوراخ بینی اول کودک کنید. نباید سواب را بیش از 1.5 سانتی‌متر وارد بینی کودک کنید.



11 سواب را به آرامی به صورت چرخشی 4 بار داخل سوراخ بینی حرکت دهید. مطمئن شوید که بین نوک پارچه‌ای و داخل سوراخ بینی تماس خوبی ایجاد شود.

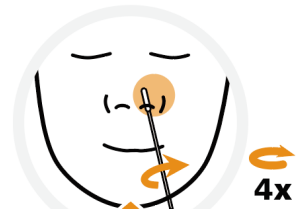

12 سوراخ بینی دوم
نوک پارچه‌ای همان سواب را به طور دقیق وارد سوراخ دوم بینی کودک کنید. حرکت چرخشی را 4 بار با برقراری تماس مناسب بین نوک پارچه‌ای و داخل سوراخ بینی تکرار کنید.



گرفتن نمونه سواب خود

توصیه

برای عملکرد بهتر، سواب را داخل لوله استخراج بگذارید و پس از سواب زدن سوراخ‌های بینی، آن را به سرعت بافر کنید.

13 سوراخ بینی اول


نوک پارچه‌ای سواب را تقریباً 1.5 سانتی‌متر وارد سوراخ بینی اول کنید. نیازی ندارید آن را فشار بدهید یا نیرویی وارد کنید.

سواب را به آرامی به صورت دایره‌ای 4 بار داخل سوراخ بینی حرکت دهید. مطمئن شوید که بین نوک پارچه‌ای و داخل سوراخ بینی تماس خوبی ایجاد شود.



14 سوراخ بینی دوم

نوک پارچه‌ای همان سواب را وارد سوراخ دوم بینی کنید. حرکت دایره‌ای را 4 بار با برقراری تماس مناسب بین نوک پارچه‌ای و داخل سوراخ بینی تکرار کنید.

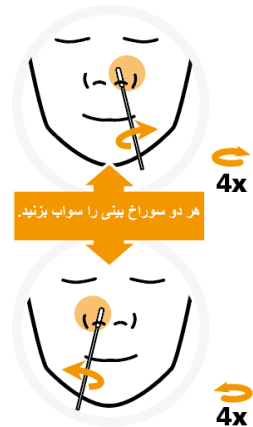


اگر شما یا فردی که بینی او را سواب می‌زنید، در این هنگام خونریزی بینی داشته باشد، کار را ادامه ندهید زیرا نمونه قابل آزمایش نیست. اگر خونریزی ادامه یافت با پزشک مشورت کنید.


هشدار

ارزیابی نمونه سواب

15 نوک پارچه‌ای سواب را وارد مایع داخل لوله استخراج کنید و سواب را حداقل 10 بار بچرخانید.

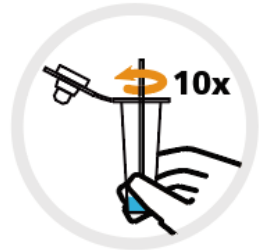

16 نوک سواب را 3 بار محکم به داخل لوله فشار دهید.

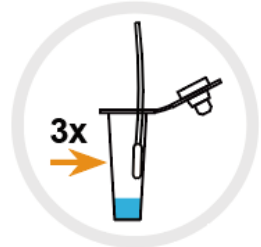


17 سواب را از لوله استخراج در بیاورید.

درپوش نازل را محکم روی لوله استخراج فشار دهید تا مانع نشستی شود.



18 سواب را در کیسه پلاستیکی زیپ دار بگذارید.

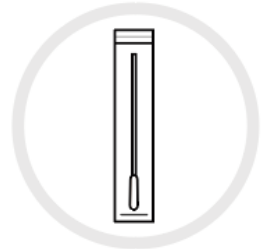


از کیسه زیپ‌دار می‌توان به‌عنوان کیسه زباله استفاده کرد.

توصیه


توصیه

مطمئن شوید که کاست تست روی سطحی صاف و هموار باشد.
در طول آزمایش، کاست تست را حرکت ندهید.

- 19** لوله استخراج را آرام فشار دهید تا **3 قطره** مایع در حفره نمونه (با علامت **S**)، بر روی نوار تست قرار گیرد.
مطمئن شوید که مایع را رها می‌کنید نه حباب هوا را.

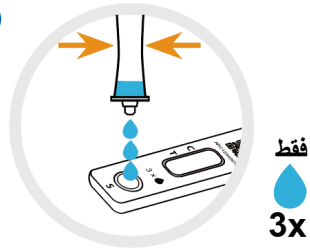

- 20** زمان‌سنج را تنظیم و برای خواندن نتیجه **10 دقیقه** صبر کنید.

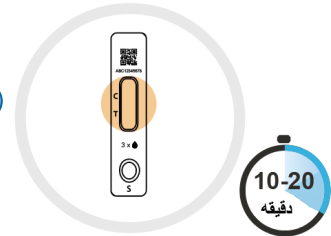

تست را بیش از **20 دقیقه** به حال خود رها نکنید زیرا نتیجه نامعتبر می‌شود.

هشدار


خواندن نتایج خود

اگر تست شما مثبت باشد



دو خط ظاهر می‌شود.
یک خط رنگی باید در ناحیه خط کنترل (C) و یک خط رنگی دیگر باید در ناحیه خط تست (T) باشد.

دو خط، یکی نزدیک به C و دیگری نزدیک به T است. حتی خطوط کم رنگ نشان می‌دهند تست مثبت است.

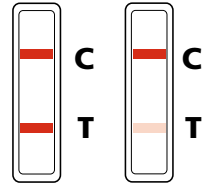

اگر نتیجه تست مثبت باشد، ممکن است بیماری شما به شدت مسری باشد.

چه کاری باید کرد:

توصیه‌های ماندن در خانه و عدم تماس با سایر افراد را رعایت کنید.
به آدرس [nhs.uk/stay-at-home](https://www.nhs.uk/stay-at-home) بروید.

در صورت امکان، به افرادی که از نزدیک با آنها تماس داشته‌اید نتیجه مثبت آزمایش خود را بگویید.

اگر تست شما منفی باشد



یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) ظاهر می‌شود. هیچ خطی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نمی‌شود. اگر نتیجه تست شما منفی باشد، احتمال دارد که در زمان تست مبتلا نبوده‌اید.




نتیجه منفی تضمینی برای این موضوع نیست که به COVID-19 مبتلا نیستید. شما و خانواده‌تان باید توصیه‌هایی را در مورد چگونگی پیشگیری از ابتلا و انتشار COVID-19 دنبال کنید.

به این صفحه بروید: [nhs.uk/how-to-avoid-covid](https://www.nhs.uk/how-to-avoid-covid)

نتیجه باطل

خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود یا تنها یک نوار قرمز (T) ظاهر می‌شود و بدین معنی است که تست باطل است.

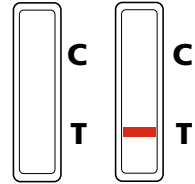

دریافت نتیجه باطل به این معنی است که نمی‌توان گفت که در زمان انجام تست به ویروس مبتلا بوده‌اید یا خیر. برای بررسی اینکه به ویروس کرونا مبتلا هستید یا خیر، تست را از مرحله یک با استفاده از کیت جدیدی تکرار کنید. از تست اول هیچ چیزی را دوباره استفاده نکنید.

کیت تست خود را به طور ایمن دور بیندازید

پس از پایان تست، کلیه محتویات کیت تست استفاده شده را در زباله خانگی خود قرار دهید و پس از دورریزی، دستان خود را به طور کامل بشویید.



در مورد تست خود بازخورد دهید یا آسیب را گزارش کنید

چنانچه قسمتی از کیت تست شما آسیب دیده یا گم شده است، از آن کیت استفاده نکنید. می‌توانید از کیت‌های تست دیگر موجود در بسته استفاده کنید.

اگر دستگاهی به شما آسیب زده است یا درباره کیت تست خود بازخوردی دارید، ارائه گزارش آن می‌تواند دیگران را یاری نماید.

به این صفحه بروید: gov.uk/covid-19-test-feedback

توصیه

هدف از انجام

هدف از انجام تست One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (طلای کلونیدی)، تشخیص کیفی آنتیژن SARS-CoV-2 در نمونه سوآب بینی انسان است. این تست برای افرادی استفاده می‌شود که مشکوک به ابتلا به COVID-19 در هفت روز اول با شروع علائمی مانند سردرد، تب، سرفه، گلودرد، از دست رفتن حس بویایی یا چشایی، تنگی نفس و دردهای عضلانی هستند. این تست را می‌توان برای افراد بدون علامت نیز استفاده کرد. هدف از نتایج تست کمک به شناسایی آنتیژن SARS-CoV-2 است. نتیجه مثبت تست حاکی از وجود آنتیژن SARS-CoV-2 است، هرچند سابقه فرد و سایر اطلاعات تشخیصی جهت تعیین وضعیت ابتلا ضروری است. نتیجه منفی تست، ابتلا به SARS-CoV-2 را رد نمی‌کند. نتیجه منفی تست در افرادی که علائم مشابه به ابتلا به COVID-19 را برای بیش از هفت روز دارند، احتمالاً باید منفی لحاظ شود. در صورت لزوم، این موضوع باید توسط سنجش مولکولی تأیید شود. هدف از تست One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (طلای کلونیدی) کمک به تشخیص ابتلا به SARS-CoV-2 است. این تست نوعی خودتست به شمار می‌رود.

اصل

این تست از آنتی‌بادی I مونوکلونال پروتئین از نوکلئوپروتئین SARS-CoV-2 استفاده می‌کند که با طلای کلونیدی پوشش داده شده روی پد نمونه و نیز آنتی‌بادی مونوکلونال II پروتئین از آنتی SARS-CoV-2 که روی خط تست پوشانده شده است، استفاده می‌کند. پس از قرارگیری نمونه‌ها روی نوار تست، آنتی‌بادی I مونوکلونال پروتئین از آنتی SARS-CoV-2 دارای برجسب طلای کلونیدی، به آنتیژن‌های SARS-CoV-2 موجود در نمونه می‌پیوندد و کمپلکس‌های آنتی ژن-آنتی‌بادی نشان دار را ایجاد می‌کند. این کمپلکس‌ها توسط اثری مویرگی به طرف ناحیه تشخیص کارت تست حرکت می‌کنند. سپس کمپلکس‌های آنتی ژن-آنتی‌بادی نشان دار موجود در خط تست توسط آنتی‌بادی II مونوکلونال پروتئین از آنتی SARS-CoV-2 ضبط می‌شوند. شدت رنگ خطوط تست بر اساس مقدار آنتیژن SARS-CoV-2 موجود در نمونه افزایش می‌یابد.

ویژگی های عملکردی

1 محدوده تشخیص (LOD)

محدوده تشخیص متوسط سوآب بینی توسط سوآب بینی SARS-CoV-2 غیرفعال شده توسط حرارت ایجاد شد. این سوآب توسط سوآب بینی منفی انسان به یک سری از غلظت‌ها اضافه شد. محدوده تشخیص برآوردی از تست وقت سری دو برابری اولیه توسط تست 20 تکرار تهیه شد. محدوده تشخیص تأییدی برای سوآب بینی 200 TCID₅₀/mL بود.

2 مطالعه توافق با بنایی

عملکرد بافتی One Step Test for SARS-CoV-2 (طلای کلونیدی) با تست مجموع 480 نمونه سوآب بینی آریژنی شد که نتایج RT-PCR مقایسه می‌شود. نتایج کلی مطالعه در جدول زیر نشان داده شده است.

مجموع	تست RT-PCR مربوط به BGI		مثبت	مثبت منفی	مثبت منفی	مثبت منفی
	مثبت	منفی				
169	4	165				
311	306	5				
480	310	170				

درصد مثبت توافق (حساسیت تشخیصی) = $165 / (165 + 5) \times 100\% = 97.06\%$ (95% CI: 93.50%-98.74%)

توافق درصد منفی (ویژگی تشخیصی) = $306 / (306 + 4) \times 100\% = 98.71\%$ (95% CI: 96.73%-99.50%)

درصد کل توافق = $(165 + 306) / 480 \times 100\% = 98.13\%$ (95% CI: 96.48%-99.01%)

3 خصوصیت تحلیلی

3.1 واکنش متقابل و تداخل میکروبی

هر کدام از آنتی‌ژن‌ها و ویروس‌ها در غیاب و با حضور SARS-CoV-2، سه بار آزمایش شدند. با توجه به نتایج تست، هیچ واکنش متقابلی با ویروس‌ها یا آنتی‌ژن‌ها مشاهده نشد.

غلظت	زیست وارد یا ویروس
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس کرونا انسانی 229E
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس کرونا انسانی OC43
9.87 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس کرونا انسانی NL63
7930 PFU/mL	ویروس کرونا MERS
1 x 10 ⁶ PFU/mL	Adenovirus (بسیار مثل Ad.71) (C1)
1 x 10 ⁶ PFU/mL	متاپوزموویروس انسانی (hMPV)
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس پارنفلز انزا نوع 1
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس پارنفلز انزا نوع 2
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس پارنفلز انزا نوع 3
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس پارنفلز انزا نوع 4a
1 x 10 ⁶ PFU/mL	انفو لانزا A
2.92 x 10 ⁴ PFU/mL	انفولانزا B
1 x 10 ⁶ PFU/mL	انفرو ویروس
1 x 10 ⁶ PFU/mL	ویروس سنسینتال تنفسی
4.17 x 10 ⁶ PFU/mL	راینوویروس
1 x 10 ⁶ CFU/mL	هومیوپلوس انفولانزا
1 x 10 ⁶ CFU/mL	استرپتوکوک پنومونیه

3.2 تداخلات

مواد احتمالی دارای تداخل ممکن است در دستگاه تنفسی فوقانی در افراد دارای علامت (شامل داروهای فاقد نسخه) باقی بماند. در غلظت‌های زیر، هیچ نتیجه مثبت با منفی کاذبی مشاهده نشد.

غلظت	مواد احتمالی دارای تداخل
5%	خون (انسان)
5 mg/mL	موسین
5% w/v	ژل بینی (NeliMed)
15% w/v	قطره بینی CVS (کرومولین)
15% w/v	Afrin (کسی متازولین)
15% w/v	اسپری بینی CVS (کرومولین)
5% w/v	داروی درمان سرماخوردگی Zicam
10% w/v	هوموپاتی (Alkaloi)
15% w/v	اسپری قنول سوزش گلو
3.3 mg/dL	تورامیاسین
0.15 mg/dL	موپیروسین
5% w/v	قرنیتازون
500 mg/dL	تامیپلو (صفحات اولستامبیر)
0.35 mg/dL	بنیوتین
0.15% w/v	متکول
0.0774 mg/dL	دیفن هیدرامین
0.00156 mg/dL	دکستر ویتروفران
1.2 mg/dL	دگر استازون

4. دقت

در خصوص مطالعه تکرارپذیری، درصد توافق نمونه های منفی و مثبت 100 درصد است. در خصوص مطالعه بازتولیدپذیری، درصد توافق نمونه های منفی و مثبت 100 درصد است.

نمادهای استفاده شده

سازنده		استریله شده توسط اکسید اتیلن		نگهداری در 30 C تا 4 C	
دستگاه پزشکی تشخیص آزمایشگاهی		استفاده بر اساس تاریخ		شماره سری ساخت	
استفاده مجدد نشود		تاریخ ساخت		به دور از نور خورشید نگهداری کنید	
احتیاط		برای استفاده به دستورالعمل مراجعه کنید		در جای خشک نگهداری کنید	
قابل بازیافت		عدم استفاده در صورت آسیب بستهبندی		محتویات کافی برای 7 تست	
نماینده مجاز در جامعه اروپا		فرد مسئول در انگلستان		نشان CE	
		شماره کاتالوگ		بدون لاتکس	



CE 1434

EC شماره گواهی 195_2022-IVDD-1434

Getein Biotech
 آدرس: (چین) No. 9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China.
 تلفن: +86-25-68568508 ایمیل: tech@getein.com.cn وبسایت: www.getein.com

UK RP

EC REP

CMC Medical Devices Ltd.
 آدرس: Office 32 19-21 Crawford Street,
 London, United Kingdom (بریتانیا)
 ایمیل: info@cmcmedicaldevices.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L
 آدرس: C/ Horacio Lengo Nº 18,
 CP 29006, Málaga, Spain (اسپانیا)
 تلفن: +34951214054

CE 0197

EC REP

Llins Service & Consulting GmbH
 Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg Germany (آلمان)

CE 0197

EC REP

Luxus Lebenswelt GmbH
 0197 Kochstr.1, 47877, Willich, Germany (آلمان)

Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd.

16 -B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China (چین)

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co, Ltd.

Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P. R.China (چین)

تولید کننده سواب